

Szándékolt felhasználás:

Az alkar mankók egy kézzel használható járást segítő eszközök, amelyek mozgáskorlátozott és járásképtelen emberek, fogyatékkal élők vagy betegek számára készültek, hogy segítsék őket a házba való be- és kijutásban, illetve rehabilitációjukban.

Az alkar mankók rugalmas mandzsettával rendelkeznek, amely az alkarot a könyök alatt veszi körül. Ez segít csökkenteni a kar terhelését és nagyobb függetlenséget biztosít a felhasználónak.

Összeszerelés:

Az alkar mankók összeszerelve és használatra készen kerülnek kiszállításra. A magasság beállításához nyomja meg a nyomógombot, és csúsztassa a mankót a kívánt magasságra. Győződjön meg arról, hogy a nyomógomb teljesen kiáll a kívánt lyukon, amikor befejezte.

Használat előtt:

1. A termék biztonságos használatának garantálása érdekében ellenőrizze, hogy a váz nem sérült-e. (Nincsenek repedések vagy törések a vázon)
2. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e összeszerelve.
3. Ellenőrizze, hogy a biztonsági alátét jól van-e meghúzva.

Karbantartás és tisztítás:

- A járókeret minden részét gyakran tisztítsa meg.
- A tisztításra szoruló felületeken csak ruhát és enyhe szappant használjon.
- Ezután használjon tiszta ruhát, és alaposan szárítsa meg a terméket, mielőtt használná.
- Ha fertőtleníteni kell a terméket, használjon közönséges, enyhe fertőtlenítőszert.

FIGYELEM (!):



A termék meghibásodása vagy megrongálódása esetén NE használja a terméket, és vegye fel a kapcsolatot a hivatalos, képzett képviselővel.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólagos felelősségünk, hogy kijelentsük, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba (I. osztály) tartoznak, és megfelelnek az 745/2017 európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

További utasítások:

- 1) Tartsa a kartámaszt a gyenge lábával ellentétes kézzel, és a támasztóalap hosszabbik oldalát befelé irányítva, ha 3- vagy 4-lábú botról van szó.
- 2) Húzza előre a terméket a gyengébb lábával, miközben teljes súlyát a erősebb lábára helyezi.
- 3) Séta közben ügyeljen arra, hogy a készüléket ne helyezze túl közel a testéhez, hogy ne botoljon meg az egyik hegyében, és ne is túl messze, hogy ne veszítse el az egyensúlyát.
- 4) Lépcsőn való használat esetén ellenőrizze, hogy a lépcső mérete elegendő-e a készülék talpának befogadásához.
- 5) A lépcsőn való felmáshoz a felhasználónak először a botot kell a lépcsőre helyeznie, majd a erősebb lábát, végül a gyengébb lábát.
- 6) A lépcsőn lefelé haladva a mankóval a sérült lábat kell követni, végül pedig az ép lábat.
- 7) Szükség esetén kérjen segítséget egy asszisztenstől.

Környezetvédelem:



Ha egy napon úgy találja, hogy termékét ki kell cserélni, vagy már nem működik, gondoljon a környezet védelmére:

- 1) Ne dobja el termékét a többi háztartási hulladékkal együtt (ez a jelzett újrahasznosítási jel is ezt jelenti).
- 2) Vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal, akik tájékoztatni fogják Önt azokról a újrahasznosító központokról, ahol termékeit elhelyezheti.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása hozzájárul a környezet védelméhez, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosításához.

ESEMÉNY JELENTÉS:

Bármely, a készülék használatával kapcsolatos súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg lakik.





Garancia

A termékre egy (1) év garancia vonatkozik a vásárlás napjától számítva. A garancia gyári hibákat fedez, de NEM fedezi a helytelen használatból, rossz karbantartásból, módosításból, visszaélésből vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő hibákat. Továbbá NEM fedezi a kopó alkatrészeket és mindazt, ami a használat során vagy az idő múlásával elhasználódhat. A garancia nem terjed ki továbbá az alábbiak által okozott károkra vagy hibákra: természeti katasztrófák, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ahol előírva) és szállító cégek. Semmi munka vagy alkatrész nem fedezett, ha azt nem ellenőrizte egy hivatalos szerviz vagy a termék gyártója. A vizsgálat szállítási költségeit a felhasználó, az ügyfél vagy a kiskereskedelmi üzlet viseli.

| VÁSÁRLÓ ADATAI / BUYERS DETAILS: | |
|-----------------------------------|--|
| TELJES NÉV: | |
| VÁSÁRLÁS DÁTUM: | |
| TELEFONSZÁM : | |
| TÉTEL VAGY SOROZATSZÁM: | |
| KERESKEDŐ ADATAI / DEALER DETAILS | |
| TELJES NÉV: | |
| CÍM : | |
| TELEFONSZÁM : | |
















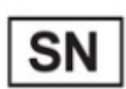


BOLT PECSÉTJE ÉS
ALÁÍRÁSA /
SIGN AND SIGNATURE

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

| A/A | REF |  |  |  |  |
|-----|---------|---|---|---|---|
| 1 | 0810066 | 22x16 cm | 79-109 cm | 23-30 cm | 100 kg |
| | | | A | B | |
| 2 | 0809781 | | 100-123 cm | 80-103 cm | 100 kg |
| 3 | 0809782 | | 100-123 cm | 80-103 cm | 100 kg |
| 4 | 0809783 | | 100-123 cm | 80-103 cm | 100 kg |

| A/A | REF | PÓTLÓ GUMIFEJ | EXTRA |
|-----|---------|---------------|----------------|
| 1 | 0810066 | 0808495 | |
| 2 | 0809781 | 0808651 | FÉNYVISSZAVÉRÓ |
| 3 | 0809782 | 0808651 | FÉNYVISSZAVÉRÓ |
| 4 | 0809783 | 0808651 | FÉNYVISSZAVÉRÓ |


A címkén, a fő kartondobozon vagy a felhasználói kézikönyvben nyomtatott szimbólumok leírása

| | | | |
|--|--------------------------|---|---|
|  | Orvos technikai eszköz |  | CE Jelölés |
|  | Gyártó |  | Gyártási dátum |
|  | Termék szám |  | Olvassa el a használati utasítást |
|  | Sorozatszám |  | Ne használja ha csomagolás sérült |
|  | Tétel szám |  | Helyes irány felfelé |
|  | Egyedi eszköz azonosító |  | Napfénytől távol tartandó |
|  | Tartsa szárazon |  | Halmazási magasság |
|  | Óvatosan kezelje |  | Törékeny |
|  | Csak beltéri használatra |  | Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv |

MOBIAK[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: KÖNYÖK MANKÓK

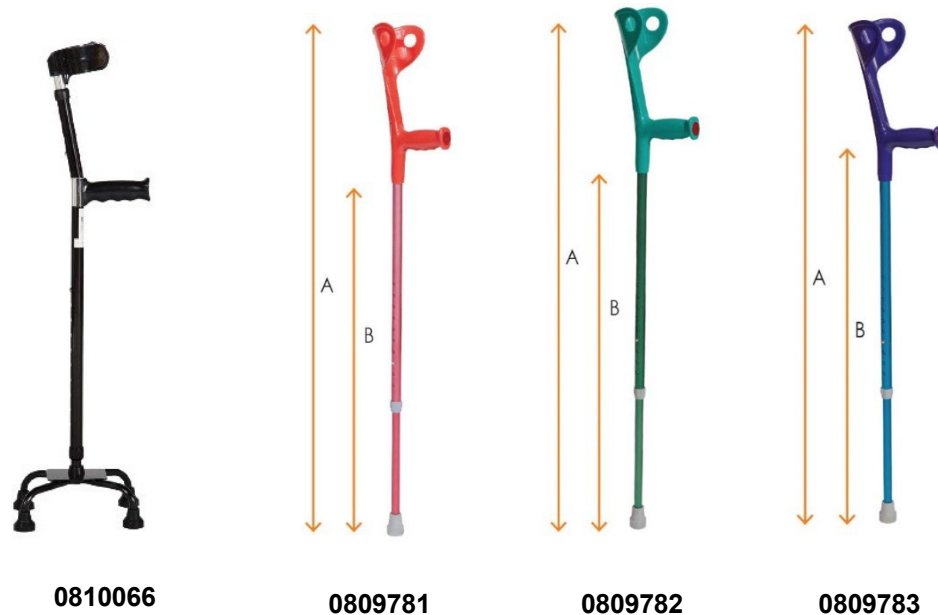

0810066

0809781

0809782

0809783

 MOBIAK S.A
KAGIANA AKROTIRIOY, XANIA - KPTH
KATHIANA AKROTIRIOY CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

CE