


Használati utasítás MEDIROAD rollátor

A rollátor részei:

1. fogantyú
2. állítható magasságú kormányrúd
3. fék
4. kormányrúd állító csavar
5. hátsó kerék
6. váz
7. elülső kerék
8. kosár
9. ülés
10. tálca
11. fék bovden
12. járóbot tartó

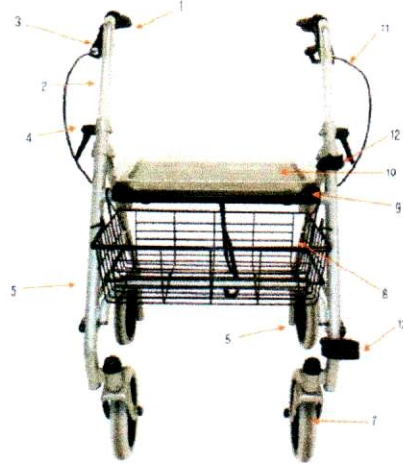

Indikáció:

A rollátor azoknak ajánlott külső és belső használatra egyaránt, akik mozgásukban akadályoztatottak és ezzel megkönnyíthető a mobilitásuk.

Csomag tartalma:

1 – rollátor 2- kosár 3- tálca 4 – használati utasítás

1. Az 1 képen látható módon helyezze a kormányrudat a váz megfelelő helyére. A kívánt magasságban szorítsa meg az óramutató járásával azonos irányban az állító csavart.

Mindkét kormányrudat azonos magasságba rögzítse és párhuzamosan a haladás iránnyal. A kormányrúd magasságának beállításához lazítsa meg az állító csavart, majd mozgassa a kormányrudat a kívánt magasságra és ismét szorítsa meg a csavart.

2. Nyissa ki a 2-es képen látható módon a rollátort úgy, hogy a markolatot nyomja lefelé, eközben az ülőlapnál támassza meg a másik kezével. Amikor az ülőlap elérte a kereszt rudat, akkor van kinyitva a rollátor teljesen.

3. A 3-as képen látható módon akassza fel az ülés alatti kereszttrúdra a kosarat, a tálcát pedig helyezze az ülőlap sima felületére.

4. A 4-es képen látható módon a fékkart a markolat felé húzva a rollátor fékezhető. Az 5-ös képnek megfelelően a fékkart lefelé nyomva ütközésig, pedig a parkoló fékezésbe állítható a rollátor. A parkoló fékezést akkor kell használni, amikor a rollátorra le kíván ülni.

5. A fék beállítását a 6-os és 7-es képen láthatja. A megfelelő fékhatást a fékkar és a bovden csatlakozásánál található állítócsavarral szabályozhatja.

6. Az ülő pozíciót a 8-as képen láthatja. Állítsa a rollátort kemény és biztos felületre. Állítsa parkoló állásba a fékeket. Ellenőrizze, hogy a rollátor megfelelően megállt. Ne dőljön hátra az ülésen!

7. Az összecsucást, szállítást és tárolást a 9-12 képeken láthatja. Összecsucáshoz húzza felfelé az ülőlap fogantyúját. Összecsucott állapotban könnyen szállítható és tárolható.

Maximális terhelhetőség: 120 kg. Csak biztos talajon használja. A tálcát kis súlyú, nem forró termékek tárolására használja maximum 5 kg-ig. A kosár maximum 5 kg-ig terhelhető. 40 C felett tartósan ne tárolja. Agresszív detergenssel ne tisztítsa.

