

Egyoldali ágykapaszkodó

REF 430 918

1. Biztonsági előírások

- ♥♥ MINDIG konzultáljon orvosával vagy szállítójával a készülék megfelelő beállításának és használatának meghatározása érdekében.
- ♥♥ Ne tárolja kültéren, és ne tegye ki közvetlen napfénynek (Vigyázat: magas külső hőmérséklet esetén ne hagyja a terméket az autóban!!)
- ♥♥ Gondosan ellenőrizze ennek a terméknek az összes alkatrészét (csavarok, csövek, kapsok stb.), és hogy minden csavar meg van-e húzva.
- ♥♥ Annak érdekében, hogy a biztonsági szintet a lehető legmagasabb szinten tartsák, amelyet a felépítése határoz meg, ezt a terméket rendszeresen (évente egyszer) nézesse át szakemberrel.
- ♥♥ A terméknek ezen használatában nem szereplő részeivel való bármilyen beavatkozás károsodást okozhat, vagy veszélyeztetheti az eszközt használó személyt.
- ♥♥ A készülék helyének kiválasztásakor ügyeljen az akadályoktól való megfelelő biztonságos távolságra. Nem szabad a fő folyosók (utak, ajtónyílások, folyosók) közvetlen közelébe szerelni.
- ♥♥ A berendezést felnőtt személynek kellő körültekintéssel kell összeszerelnie. Ha kétségei vannak, hívjon egy másik személyt, aki lehetőleg technikailag tehetséges.
- ♥♥ Csak kisegítő ágyrácsként és megfelelő módon használja.
- ♥♥ Ezen az eszközön semmilyen módosítást nem szabad végrehajtani. A törött vagy hibás cseréhez csak eredeti alkatrészeket használjon, és ezt bízza a műszaki személyzetre.
- ♥♥ NE akasszon fel semmit sem a korlátra.
- ♥♥ A termék összeszerelése után, használata előtt győződjön meg arról, hogy biztonságosan reteszelve és rögzítve van.
- ♥♥ Ha hosszabb ideig nem használta a terméket, használat előtt hagyja, hogy a műszaki személyzet ellenőriztesse.
- ♥♥ Mindig ellenőrizze a stabilitást használat előtt.
- ♥♥ Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg letelepedett.

2. Telepítés

Rendeltetésszerű használat:

Csak szakemberek állíthatják be a terméket és taníthatják meg a használatára. A helytelen használat vagy beállítás túlzott igénybevételhez vezethet a készülékben vagy a páciensben.

A készüléket a műszaki személyzetnek egyedileg kell beállítania az Ön igényeinek megfelelően. Kérdezze meg a műszaki személyzetet, hogyan kell használni ezt a terméket, és győződjön meg arról, hogy világosan megértette a magyarázatot. Kétség esetén ne habozzon újra kérdezni.

Javallatok:

Betegségek és fogyatékoságok, amelyek az ágyból való éjszakai kieséshez vezethetnek, és megnehezíthetik a biztonságos felkelést.

Ellenjavallatok:

A felső végtagok súlyos izomgyengesége, mentális és pszichiátriai betegségek, például demencia, Alzheimer-kór.

Összeszerelés

Illessze az [A] részt a [B] részre, rögzítse a kapsokkal (1).

Használat előtt ellenőrizze, hogy a bilincs fémcsapja átment-e mindkét csövön, és átmegy-e a külső csövön.



Helyezze az ágyrácsot a matrac alá.
Használat előtt ellenőrizze a stabilitást.

3. Tisztítás

Rendszeresen tisztítsa meg a terméket száraz és tiszta ruhával.


4. Anyagok

A termék krómozott acélból, és különböző műanyag részekből áll.

5. Ártalmatlanítás

A terméket a regionális hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

6. Műszaki leírás

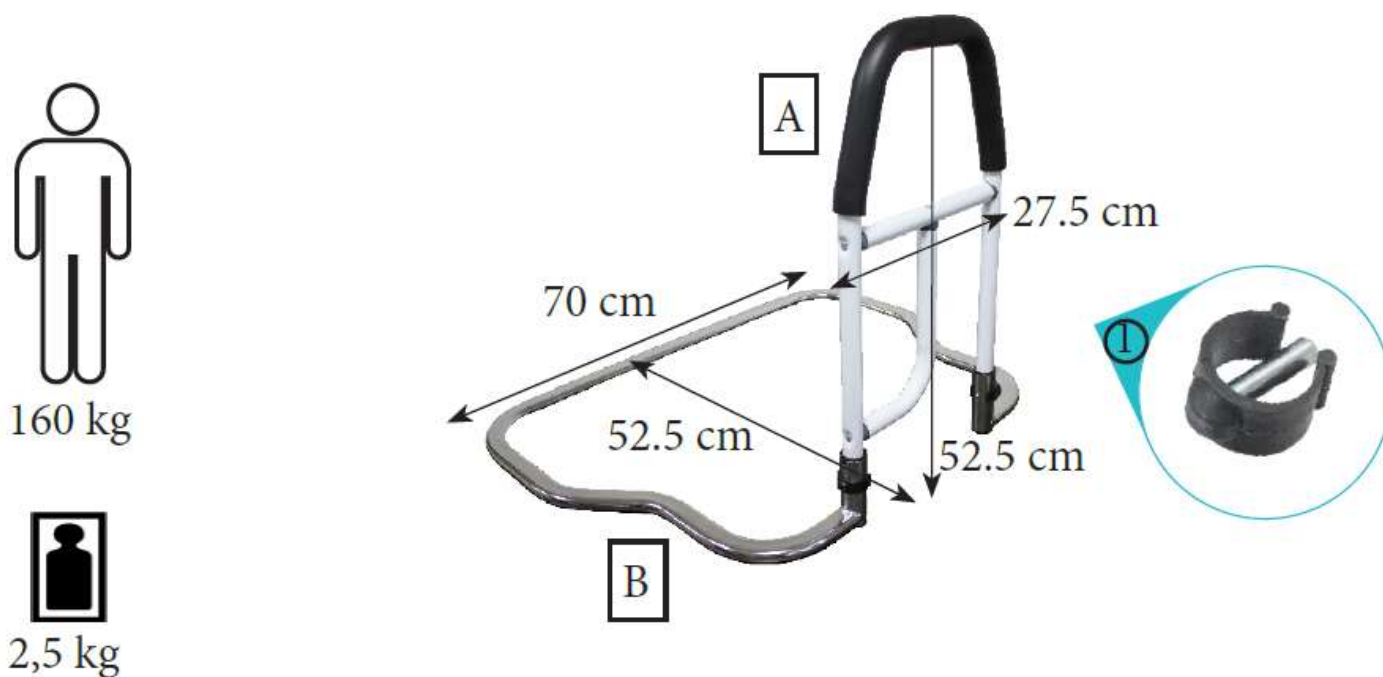

JÓTÁLLÁS: 12 hónap a vásárlás időpontjától számítva. Reklamációhoz meg kell őriznie a számlát a vásárlás igazolásaként. A terméket kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírt felhasználásra szánják. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.

Forgalmazó: Vital Pro Kft.

Székhely: 4211 Ebes, Zsong-völgy út 8. ☎ +36 30 497 09 57 ✉ info@vital-pro.hu