



AD10 HASI-CSÍPŐTÁJÉKI RÖGZÍTŐPÁNT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



I. osztályú orvostechnikai eszköz az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 745/2017/EU rendelet (MDR) szerint, és mint ilyen, megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek.

Az orvostechnikai eszköz helyes rendeltetésének és optimális működésének biztosítása érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt első alkalommal használja. Ellenőrizze a termék megfelelő külső megjelenését és integritását, valamint a csomagolás sértetlenségét.

A CSOMAG TARTALMA: 1 kerekesszék öv, 1 használati útmutató, 1 reklámlap.

INDIKÁCIÓK: Ez az öv a medence helyes helyzetének elérésére szolgál. Megakadályozza az alacsony izomtónusú betegek előreeszúsását a kerekesszékben. Optimális beállítást tesz lehetővé az előlő beállító rendszer miatt.

KONTRAINDIKÁCIÓK: A termék használata ellenjavallt a páciens izgatottsága esetén, valamint olyan páciensek esetében, akik leválaszthatják magukról az eszközt, vagy önállóan ki tudják oldani a csatokat. Ne használja allergia esetén valamely összetevőre.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK: Javasoljuk, hogy a terméket megfelelő végzettségű, szakképzett személy helyezze fel. A termék állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az eredeti terméket nem szabad módosítani. A termék nem érintkezhet közvetlenül sérült területtel. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizzék és kövessék nyomon a termék helyes használatát a felhasználó által. Soha ne hagyja az eszközt olyan gyermekek és / vagy személyek számára elérhető helyen, akik nem tudnak vigyázni magukra. Az alkatrészek textil jellegéből adódóan ne tegye ki a terméket hőforrásnak. Nincsenek ismert mellékhatások.

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ:

1. Húzza ki a két pántot, csak egyszer vezesse át a pántot a csaton.
2. Rögzítse a pántot a kerekesszék csövéhez, és vezess át még egyszer a pántot a csaton.
3. A páciens üljön le a kerekesszékre.
4. Rögzítse a második pántot a kerekesszék másik oldalán lévő csőhöz, ugyanúgy, mint a 2. lépésnél.
5. Zárja be az előlő csatot, és szorosan húzza meg a pántokat.

MÉRET: Egységes méret (Szövet szélesség: 8cm, pánt szélesség: 2,5cm, szövet hosszúság: 47cm, teljes hossz: 170 cm)

ANYAGÖSSZETÉTEL: Laminált szövet: 100% poliészter. Pánt: 100% poliészter. Csát: Acetál.

TÁROLÁS ÉS ÁPOLÁS: Gépi mosás legfeljebb 60 C°-on. Tilos vegytisztítani vagy vasalni. Ne szárítsa szárítógépben. Mosáskor csukja be a csatot. Ne használjon fehérítőszert. Tárolja száraz, fénytől védett helyen, szobahőmérsékleten, eredeti csomagolásában.



HASZNÁLAT: Terápiás céljaira tekintettel ezt a terméket más személy nem használhatja fel újra.

HULLADÉKKEZELÉS: A hulladékkezelés tekintetében a termék és alkatrészei megfelelnek a helyi hatóságok által megállapított hatályos rendelkezéseknek.

JÓTÁLLÁS: 24 hónap a vásárlás időpontjától számítva. Reklamációhoz meg kell őriznie a számlát a vásárlás igazolásaként. A terméket kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírt felhasználásra szánják. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá. A kártérítés az áru értékére korlátozódik. A következményes kártérítés kifejezetten kizárt.

Gyártó:

Forgalmazó:



SHANAE SERVICIOS GERIÁTRICOS S.L.U
C/Emilio Arrieta Nº27-1B 31002 Pamplona
(Navarra) Spain

Thuasne Hungary Kft.
1117 Bp, Budafoki út 60.

