

BELLAVITA
NOVA



Használati utasítás

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék sáv EN	
Tartalomjegyzék	2
Előszó	3
Megfelelőségi nyilatkozat	3
Élettartam	3
Típustábla	3
Újrahasznosítás	3
Garancia	3
A termék alkatrészei	4
Termékleírás	5
Nyilatkozatok	5
Az Ön biztonsága érdekében	5
Fontos biztonsági szabályok	6
Elektromágneses összeférhetőség (EMC)	6
A szállítás tartalma	6
A tapadókorongok felszerelése	7
A burkolatok felhelyezése/eltávolítása (opcionális)	7
A fürdőkád-emelő rögzítése a kád aljához aljához	7
A kézi vezérlő	8
Működtetés fürdés közben	9
A háttámla eltávolítása és visszahelyezése	10
A fürdőkádból való kivezetés	10
Karbantartás és ápolás	11
Tisztítás	11
A borítók ápolása	11
Új dugók felszerelése a fürdőkád-emelő burkolatára	12
A töltőegység és az akkumulátor javítása / karbantartása	12
A fürdőkád-emelő biztonságos szállítása	12
Műszaki adatok	13
Működési környezeti feltételek	13
Szállítási és tárolási szállításhoz és tároláshoz	13
Hulladékkezelés	13

Előszó

Köszönjük, hogy a Drive DeVilbiss termékeit választotta Healthcare termékei közül.

Ezt a használati utasítást figyelmesen olvassa el az első használat előtt, mivel fontos biztonsági információkat tartalmaz. Ha bármilyen kérdése van a Bellavita NOVA fürdőkád-emelő szerelésével, üzemeltetésével vagy karbantartásával kapcsolatban, vagy további információra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Drive DeVilbiss Healthcare forgalmazójához.

A legfrissebb használati utasítás PDF formátumban elérhető a Drive DeVilbiss Healthcare weboldalon vagy igényelhető a Drive DeVilbiss Healthcare-től ügyfélszolgálat.

Látássérült személyek számára nagyított formátumok jeleníthetők meg. Vak betegeket gondozójuknak kell betanítania.

Gondoskodjon arról, hogy ezt a használati utasítást gondosan megőrizze.

Megfelelőségi nyilatkozat

A DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG kijelenti, hogy a leírt termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletnek.

Élettartam

A termék élettartama öt évre becsülhető, feltéve, hogy a terméket rendeltetésszerűen használják, és minden karbantartási és szervizelési követelményt betartanak.

Az élettartam jelentősen meghaladhatja a becsült értéket, ha a terméket gondosan kezelik, karbantartják, szervizelik és a használati utasításnak megfelelően használják. Az élettartam viszont jelentősen lerövidülhet szélsőséges és nem megfelelő használat esetén.

Az élettartamra vonatkozó becsülésünk nem jelent további garanciát.

Típustábla



1 Cikkszám | 2 Terméknév | 3 Gyártó | 4 Sorozatszám | 5 UDI-kód | 6 Max. terhelés | 7 Kövesse a használati utasítást | 8 Orvostechnikai eszköz | 9 Gyártás dátuma (év/hónap)

Újrafelhasználás

Ez a termék újra felhasználható. Felhívjuk figyelmét, hogy a biztonságos kezeléshez szükséges összes műszaki dokumentumot át kell adni az új felhasználónak is.

A terméket a szakkereskedőnek ellenőriznie, tisztítania/fertőtlenítenie kell, és el kell végeznie a szükséges karbantartási munkákat, mielőtt újra használatba vennék.

Az előkészítés során mindig kövesse a használati utasítást.

A rendelkezésre álló kiegészítők beszerezhetők a szakkereskedőnél vagy a www.drivedevilbiss.co.uk weboldalon.

Garancia

A Drive DeVilbiss Healthcare 5 év garanciát vállal erre a termékre, valamint 2 év garanciát a kézi vezérlőre és az akkumulátorra.

A fogyóeszközök (pl. fedelek és tapadókorongok) általában nem tartoznak a szokásos jótállási időszak hatálya alá, kivéve, ha az alkatrészek javítására vagy cseréjére olyan gyártási vagy anyaghibából eredő, egyértelmű és közvetlen következményként került sor, amely szükségessé tette azokat.

Ez a garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket elhanyagoltak, helytelenül használtak, módosítottak, a rendeltetéstől eltérő módon használtak és/vagy nem jóváhagyott alkatrészekkel karbantartottak.

A DeVilbiss Healthcare folyamatos termékfejlesztési politikát folytat, és fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő specifikációk módosítására.

A termék alkatrészei



BELLAVITA NOVA

- | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. Háttámla | 4. Ollós emelőmechanizmus | 7. Fogaskerekes vezető |
| 2. Ülésfelület | 5. Alaplemez | 8. Kézi vezérlő |
| 3. Oldalsó szárnyak | 6. Tapadó talpak | |

Termékleírás

A Bellavita NOVA fürdőkad-emelő megfelel az EN ISO 10535, EN 60601-1 és EN 60601-1-2 szabványoknak.

A Bellavita NOVA fürdőkad-emelő főként újrahasznosítható műanyagból készült, könnyű szerkezetű. Ennek köszönhetően könnyen szállítható és tárolható.

A kézi vezérlő lítium-ion akkumulátort tartalmaz, és kényelmes, biztonságos emelést és leengedést tesz lehetővé normál ülő helyzetben. Lehetőség van a fürdőkad-emelő közbelső pozíciókba állítására is, így a felhasználó kiválaszthatja a számára legkényelmesebb helyzetet.

A hajtómotor és a kézi vezérlő vízálló burkolattal rendelkezik.

A magasságállítható váz 6,5–48 cm közötti magasságba emelést és leengedést tesz lehetővé. A fel/le gombok megnyomásával az emelőrúd felemeli vagy leengedi a fürdőkad-emelőt. A levehető háttámla az üléshez/alapegységhez rögzíthető.

Az integrált töltésszabályozásnak köszönhetően a fürdőkad-emelő csak akkor süllyed le, ha elegendő töltöttség áll rendelkezésre a teljes emeléshez.

Átlagos használati gyakoriság (naponta egyszer) esetén ajánlott a terméket 5 év után cserélni (a termék általános állapotától függően).

Nyilatkozatok

Rendelkezési cél: Hogy a mozgáskorlátozott felhasználó önállóan fürödhessen a kádban.

Javallatok: Olyan mozgáskorlátozott felhasználók segítése, akik önállóan nem tudnak leülni a kádba és onnan felállni.

Célcsoport: Legfeljebb 170 kg testsúlyú, felső és/vagy alsó testrészének mozgásképesége korlátozott felhasználó, aki sérülés, fizikai fogyatékoság vagy egészségügyi állapot miatt nehezen tud állni és/vagy leülni.

Használati környezet: Fürdőszoba otthoni vagy ápolási otthonban.

Ellenjavallatok: Olyan felhasználók, akiknek mentális képességei nem elegendőek a fürdőkad-emelő önálló és biztonságos működtetéséhez, valamint azok a felhasználók, akik túllépik a maximális súlyhatárt.

Lehetnek egyéb ellenjavallatok is, amelyek az egyes felhasználókra és/vagy a használati környezetre vonatkoznak.



Az Ön biztonsága érdekében

A fürdőkad-emelővel való biztonságos fürdés érdekében gondosan olvassa el a használati utasítást, és pontosan kövesse az abban szereplő információkat.

Figyelem: A fürdőkad-emelőt tilos létraként, a kádba való be- és kiszállást segítő eszközként, fel- és leereszkedéshez való segédeszközként, támaszként, emelőplatformként vagy bármilyen, a rendeltetésétől eltérő célra használni. Kizárólag fürdőkadban való fürdéshez szabad használni.

Figyelem: Ne lépje túl a 170 kg-os maximális terhelést.

Figyelem: Az állatokat távol kell tartani a fürdőkad-emelőtől. Gyerekek csak akkor használhatják a terméket, ha alkalmasnak ítélték őket a fürdőkad-emelő használatára, és ha szülőjük vagy gondviselőjük folyamatosan velük van.

Figyelem: Meghibásodás vagy sérülés esetén haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével. Ne végezzen engedélyezetlen módosításokat vagy javításokat. A javításokat kizárólag felhatalmazott szakember vagy a gyártó végezheti. Ezen előírás be nem tartása a jótállási igény érvényét veszti.

Figyelem: Ne tárolja a terméket közvetlen hőforrások közelében vagy közvetlen napfénynek kitéve.

Figyelem: A fürdőkad-emelő szállítása előtt ki kell húznia a kezelőegység csatlakozóját.

Figyelem: Amennyiben a fürdőemelő hosszú ideig alacsony hőmérsékletnek volt kitéve (például télen hosszabb ideig járműben tárolták), ne használja, amíg a készülék hőmérséklete vissza nem áll szobahőmérsékletre.

Figyelem: Fürdőolajok vagy fürdőszók használata esetén tartsa be az ajánlott adagolást. Az adalékanyagok negatív hatással lehetnek az ollós emelő csúszó működésére, és

a műanyag elszíneződését is okozhatja. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy minden fürdés után minden maradékot lemosjon és eltávolítson, és hogy a tapadó talpak jól tapadjanak a kádhöz.

Figyelem: A fürdőkád-emelő tisztításához ne használjon ecetet tartalmazó tisztítószeret.

Információk az akkumulátorról, a tápegységről és a kézi vezérlőről:

- A kádemelőt kizárólag a kézi vezérlővel működtesse.
- A fürdőkád-emelőt kizárólag eredeti Drive DeVilbiss Healthare kézi vezérlővel szabad működtetni.
- **Figyelem:** Soha ne dobja a kézi vezérlőt tűzbe, és ne tárolja tűz, erős hőforrások közelében vagy közvetlen napfénynek kitéve.
- **Figyelem:** Ne nyissa ki a kézi vezérlőt. A vezérlő kinyitása érvényteleníti a garanciát.
- A kézi vezérlő feltöltéséhez kizárólag a mellékelt töltőt használja.
- **Figyelem:** Ha a kézi vezérlő burkolata megsérült, azt többé nem szabad használni.
- **Figyelem:** Az Ön biztonsága érdekében a töltőt kizárólag a fürdőszobán kívül, száraz helyen szabad használni. A töltőt kizárólag a mellékelt kézi vezérlő töltésére szabad használni.
- Az akkumulátort / kézi vezérlőt az első használat előtt és minden további használat után fel kell tölteni. Ha a fürdőkád-emelőt hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort 3 havonta fel kell tölteni az élettartamának meghosszabbítása érdekében.
- **Figyelem:** Ne helyezzen vezetőképes tárgyakat (pl. kötőtűt, fémcsapot stb.) a kézi vezérlő aljzatába.
- **Figyelem:** A kézi vezérlő és/vagy a töltőegység tisztítása előtt mindig húzza ki a töltő csatlakozóját a konnektorból.
- A kézi vezérlő és/vagy a töltőegység tisztításához kizárólag száraz ruhát használjon.
- Bár a fürdőkád-emelő, a kézi vezérlő és a töltőegység strapabíró kivitelű, ne ejtse le őket.
- **Figyelem:** Ne használja a fürdőkád-emelőt, ha külsőleg látható és/vagy hallható sérülés van rajta. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével. Javasoljuk, hogy keresse fel a használati utasítás végén található címet.
- További információk, műszaki adatok és elérhetőségekért kérjük, olvassa el a teljes használati utasítást.

Fontos biztonsági szabályok

- Mindig üljön a fürdőkád-emelő közepére, háttal a háttámlának, kissé nyújtsa ki a lábait, és tegye a kezét a kád szélére vagy az ölébe.
- **Figyelem:** Emelés vagy leengedés közben ne fogjon meg semmit a kád szélének és a fürdőkád-emelő között, sem az ülésfelület alatt, mivel ez beszorulásos sérülésekhez vezethet.

- **Figyelem:** Súlyos fizikai vagy tanulási fogyatékkal, illetve mentális zavarokkal küzdő személyeket soha ne hagyjon felügyelet nélkül a kádban.
- **Figyelem:** Csak akkor fürödjön önállóan, ha egészségi állapota ezt lehetővé teszi, ellenkező esetben csak felügyelet mellett fürödjön.
- A fürdőkád-emelő használata előtt végezzen működésellenőrzést (mozgassa fel és le a tartógombot lenyomva tartva, és ellenőrizze a VÉSZLEÁLLÍTÁS funkciót).
- **Figyelem:** Meghibásodás esetén ne használja tovább a fürdőkád-emelőt; helyette javíttassa meg a forgalmazónál.
- Győződjön meg arról, hogy a fürdőkád-emelő környékén nincsenek tárgyak (pl. kefék stb.).
- A termékkel kapcsolatban bekövetkező bármely súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak az illetékes hatóságnak, amelynek területén a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.

Elektromágneses kompatibilitás (EMC)

Ez a termék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló tanácsi irányelvben felsorolt védelmi követelményeknek. Bizonyos körülmények között azonban nem zárható ki teljesen az elektromos eszközök közötti kölcsönös interferencia, különösen mobiltelefonok használata esetén. Ne üzemeltessen a fürdőkád-emelő közelében olyan életmentő vagy életfenntartó eszközöket, amelyek meghibásodás esetén veszélyt jelenthetnek a felhasználókra. Ezek bizonyos körülmények között meghibásodhatnak, vagy zavarhatják a fürdőkád-emelő megfelelő működését. Ha észleli, hogy a fürdőkád-emelő vagy a közelében működtetett elektromos eszközök meghibásodtak, vagy nem a várt módon működnek, vegye ki a fürdőkád-emelőt a forgalomból, és vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

A szállítás tartalma

A szállításkor a dobozban a következő alkatrészeknek kell lennie:

- Háttlap beépített motorral
- Ülőegység oldalsó szárnyakkal
- Kézi vezérlő
- Töltőegység
- 4 db tapadókorong
- Oldalsó szárnyak elterelői
- Használati utasítás


Ha a felsorolt alkatrészek közül valamelyik hiányzik vagy megsérült, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével.

A doboz újra felhasználható a fürdőkád-emelő szállításához és tárolásához.

Az akkumulátoros kézi vezérlőt az első használat előtt fel kell tölteni. Ehhez kövesse a „Az akkumulátoros kézi vezérlő feltöltése” című fejezetben található utasításokat.

A tapadókorongok felszerelése

1. A hátsó tapadókorongok behelyezéséhez először helyezze be a mozgatható dugókat az alaplemez aljára (1. kép).

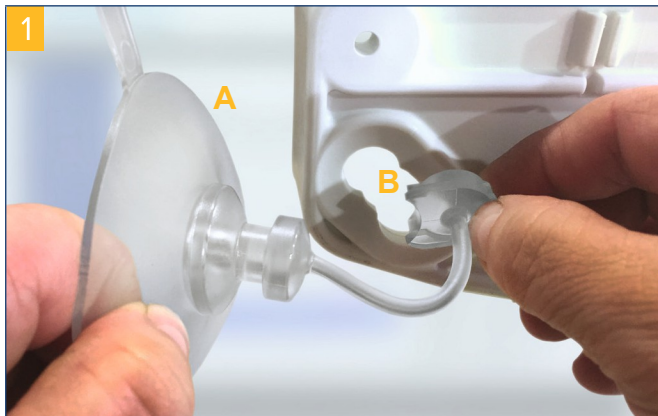

A) Gomba alakú fej | B) Dugó

2. Nyomja a tapadókorong gomba alakú fejét a kis nyílás felé, és óvatosan forgassa el a végső helyzetébe. Győződjön meg arról, hogy a szellőzőfülek hátrafelé néznek (2. kép).



C) Szellőzőfülek

3. Nyomja be a dugót a felső oldalról a lemez nyílásába, amíg egy síkba nem kerül (3. kép).



4. Az előlő tapadókorongot ugyanúgy helyezze be. Ebben az esetben azonban az oldalról be kell illesztenie a szellőzőfüleket is az alaplemez nyílásaiba. Ezzel az előlő tapadókorongok eltávolításakor automatikusan kiszellőznek (4. kép).




A burkolatok felhelyezése/eltávolítása (opcionális)

A huzat rögzítéséhez egyszerűen helyezze a huzatot a megfelelő pozícióba a háttámla lemezén vagy az ülés felületén, majd kézzel nyomja be teljesen a rögzítógombokat a háttámla lemezének vagy az ülés felületének megfelelő nyílásaiba (5. kép).

A fürdőkád-emelő üléshez nélkül is használható. A huzat eltávolításához húzza ki a rögzítógombokat a lyukakból (6. kép).



Üléshez

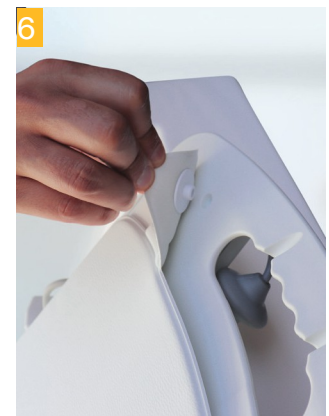

Háttámla burkolat

A fürdőkád-emelő rögzítése a kád aljához

Figyelem:

A tapadókorongok rögzítik a fürdőkád-emelőt a kád aljához. A fürdőkád és a fürdőkád-emelő alján található tapadókorongok tisztáknak és szárazaknak kell lenniük, amikor a fürdőkád-emelőt a kádban használja. A legjobb tapadás biztosítása érdekében ajánlott a tapadókorongokat és a fürdőkádakat rendszeresen tisztítani kereskedelemben kapható tisztítószerrel. Mint már említettük, kérjük, távolítsa el az esetleges maradványokat (szappan stb.) a fürdőkád-emelőről és a tapadókorongokról.

1. Győződjön meg arról, hogy az üres kád alja tiszta, és hogy a kádban nincsenek csúszásgátló szőnyegek.
2. Helyezze az ülőegységet az üres kádba úgy, hogy a tapadókorongok az alaplemezre illeszkedjenek. Győződjön meg arról, hogy az ülőegységet úgy helyezte el, hogy a háttámla teljesen leengedhető legyen anélkül, hogy a kád falához érne.

3. Ezután illessze be a beépített motorral ellátott háttámla-tartókat az ülés egység rögzítőcsapjaiba a 7. és 8. képen látható módon.



Fontos!

Mindig győződjön meg arról, hogy a háttámla csatlakozói megfelelően vannak-e rögzítve az ülésalap csapjaihoz. Ekkor hallható kattanás hallatszik.

A piros vezérlőkart helyesen kell elhelyezni a háttámlán (9. és 10. kép).



HELYTELEN



HELYES

4. Helyezze be a csatlakozó dugót (a kézi vezérlő kábel végén) a háttámla tetején található csatlakozóba. Győződjön meg arról, hogy a dugó teljesen be van dugva, és érezhetően a helyére kattan. Ha helyesen van behelyezve, a piros gyűrű már nem látható (11–12. kép).



HELYTELEN



HELYES

A kézi vezérlő

A teljesen feltöltött kézi vezérlővel körülbelül 6 fürdőt lehet elvégezni, a felhasználó testsúlyától függően. A fürdőzés során a kézi vezérlőn lévő jelzőfény zölden világít.

Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje egy bizonyos értékre csökken, a jelzőfény színe sárgára vált, és lassan villogni kezd, jelezve, hogy még körülbelül 1 fürdőzésre elegendő az energia. Ezt követően az akkumulátort az utasításoknak megfelelően fel kell tölteni. Az optimális teljesítmény érdekében ajánlott a kézi vezérlőt minden fürdőzés után feltölteni.

Ha az akkumulátor-jelzőfény sárga színű, miközben a fürdőemelőt használja, a fény színe sárgáról pirosra változhat, és gyorsan villogni kezdhet. Ebben az esetben a fürdőemelő csak felfelé mozog, biztosítva, hogy a felhasználót biztonságosan ki lehessen emelni a kádból.

ZÖLD fény: A fürdőkádelő használatra kész.

SÁRGA fény: A fürdőkádelő részlegesen működik, az akkumulátor kapacitása csak 1 fürdőzésre elegendő. Az akkumulátort azonnal fel kell tölteni.

PIROS fény: A fürdőkádelő már nem használható, csak felfelé tud mozogni. Az akkumulátort azonnal fel kell tölteni.

VÉSZLEÁLLÍTÓ gomb (piros):

Ha vész helyzetbe kerül, és le kell állítania a fürdőkádelőt, nyomja meg a piros VÉSZLEÁLLÍTÁS gombot (13. kép).

A fürdőkádelő újraindításához nyomja meg újra a zöld bekapcsoló gombot. Ha nem nyom meg semmilyen gombot, a kézi vezérlő 30 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Ha saját maga szeretné kikapcsolni a fürdőkádelőt, nyomja meg a kézi vezérlőn található piros gombot (a jelzőfény kialszik).

- VÉSZLEÁLLÍTÓ gomb (piros)
- Jelzőfény (LED)
- Lefelé gomb (kék)
- Felfelé gomb (sárga)
- Bekapcsoló gomb (zöld)



Működtetés fürdés közben

1. A fürdőkádelő első használata előtt és minden használatkor győződjön meg arról, hogy a kézi vezérlő () megfelelően van-e csatlakoztatva () a fürdőkádelőhöz ().
A vezérlő akkor van helyesen csatlakoztatva, ha a csatlakozó piros gyűrűje már nem látható (14–15. kép).
2. Nyomja meg a kézi vezérlőn található bekapcsológombot (zöld). Ekkor a jelzőfény zölden világít.



3. Most nyomja meg a felfelé irányuló gombot (sárga). A háttámla először függőleges helyzetbe mozog. A fürdőkádelő ezután a végállásba mozog, és automatikusan kikapcsol. (A gomb elengedésével a fürdőkádelő a kívánt helyzetben áll meg)
4. Emelje ki az oldalsó szárnyakat. Az ülőfelületet csak addig emelje fel, amíg az a kád peremével egy magasságba nem kerül, és az oldalsó szárnyak egy vízszintes felületet nem alkotnak, ami megkönnyíti az átülést.
Fontos: Az oldalsó szárnyaknak egyenesen kell feküdniük a kád szélén.
5. A felhasználónak le kell ülnie, vagy segítséget kell kapnia a fürdőkádelőre való felüléshez.


Fontos: A fürdőkádelő felemelése és leengedése közben a felhasználónak a háttámlához kell dőlnie, és a kezét az ölében kell tartania. A felemelés vagy leengedés során ne fogjon meg semmit a kád oldala és a fürdőkádelő között, sem az ülőfelület alatt, mivel ez beszorulásos sérüléshez vezethet.

6. A fürdőkádelő leengedéséhez nyomja meg a lefelé gombot (kék). A fürdőkádelő először a legalacsonyabb pozícióba mozog. Ezután a háttámla automatikusan hátrafelé kezd dőlni. A fürdőkádelő teljesen hátradőlt helyzetben áll meg, azonban a gomb elengedésével a kívánt dőlt vagy ülő pozícióban áll meg. **Fontos: Ha a háttámla hozzáér a kád hátsó falához, azonnal engedje el a kék gombot.**
7. A fürdés befejezése után nyomja meg a kezelőegység felfelé irányuló gombját (sárga), hogy a fürdőkádelőt a fürdőkádból való kiszálláshoz megfelelő magasságba emelje (az oldalsó szárnyak vízszintesen a kád peremén). Győződjön meg arról, hogy az oldalsó szárnyak nem akadnak be a kádon található fogantyúba – **ha a kádon fogantyúk vannak, oldalsó szárny-terelőket kell használni.**
8. Segítsen a fürdőből kijutni. Nyomja meg a piros gombot a kézi vezérlő kikapcsolásához. Ha a kézi vezérlőt tovább nem használja, az 30 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
9. Az optimális teljesítmény érdekében minden fürdés után töltsen fel a kézi vezérlőt.

A háttámla eltávolítása és visszahelyezése

A háttámla eltávolítása

A háttámla csak leengedett helyzetben távolítható el. **Kérjük, vegye figyelembe:** a háttámlát kissé előre kell dönteni, hogy eltávolíthassa (16. kép).

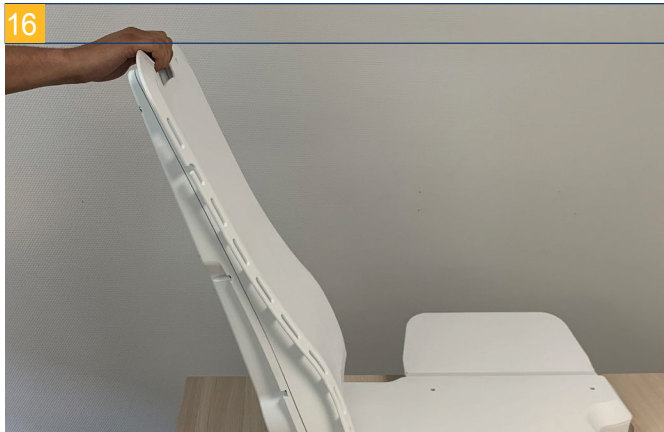

Nyomja meg a piros vezérlőkart, és tartsa lenyomva (17. kép).



Szabad kezével fogja meg a háttámla fogantyúját, és húzza felfelé, miközben továbbra is lenyomva tartja a piros vezérlőkartot.

A háttámla visszahelyezése

A háttámla visszahelyezéséhez (18. kép) illesse be a háttámla konzoljait az ülés egység csapjaiba.




Nyomja lefelé. Hallható kattanást fog hallani. (19. kép)



Hagyja, hogy a háttámla visszacsússon. A háttámla most már hátradöntött helyzetben van.

A fürdőkádból való kivezetés

1. Először a kézi vezérlővel engedje le a fürdőkád-emelőt egészen a kád aljára. Tartsa lenyomva a lefelé gombot, amíg a fürdőkád-emelő teljesen hátradőlt helyzetbe nem kerül (a fürdőkád-emelő akkor is megáll, ha eléri a teljesen hátradőlt helyzetet).
2. A háttámla eltávolításához a háttámlát előre döntse (20. kép). Nyomja meg a piros vezérlőkart, és tartsa lenyomva (21. kép). Szabad kezével fogja meg a háttámla fogantyúját, és emelje fel, miközben továbbra is lenyomva tartja a piros vezérlőkartot.

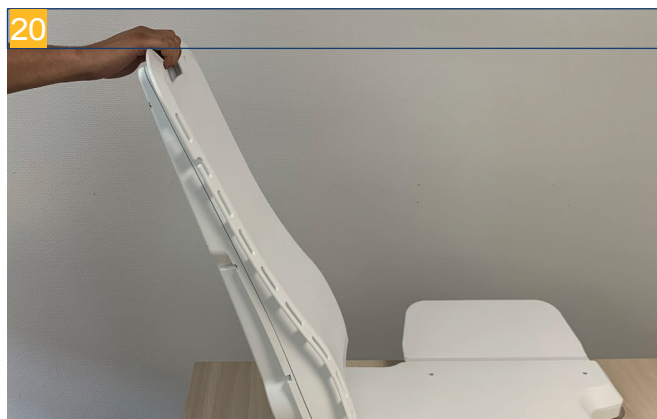



3. Hajtsa be az oldalsó szárnyakat befelé az ülés felületére.
4. Húzza meg a füleket, hogy mindkét hátsó tapadókörongot kioldja az alaplemezről. Ezután folytassa az ülés/alaplemez előre emelését, és az elülső tapadókörongok automatikusan kinyílnak és kioldódnak. Emelje fel, és vegye ki az ülés/alaplemez egységet a kádból.

Karbantartás és ápolás

A fürdőkád-emelő karbantartása

A fürdőkád-emelő karbantartásmentes csapágyakkal és csapágyfelületekkel van felszerelve, így nincs szükség kenésre.

A fürdőkád-emelőt legalább 6 havonta rendszeresen ellenőrizni kell (a felhasználó által végzett szemrevételezés). Ez magában foglalja a teherhordó alkatrészek és a biztonsági berendezések szemrevételezését, valamint a teljes működésellenőrzést.

Ha ez az ellenőrzés olyan hibákat, kopást vagy egyéb károsodást tár fel, amelyek veszélyeztethetik a fürdőkád-emelő biztonságát, akkor a fürdőkád-emelőt ki kell vonni a forgalomból, és a problémát orvosolni kell. A javításokat kizárólag olyan felhatalmazott, kompetens személynek/kereskedőnek szabad elvégeznie, aki megfelelően és alkalmasan képzett, és aki képzettsége és ismeretei alapján megfelelően el tudja végezni az ilyen típusú javításokat. Bármilyen hibát be kell jelenteni annak a kereskedőnek, akitől a fürdőkád-emelőt vásárolták.

Fontos: A kézi vezérlőt kizárólag a fürdőkád-emelő gyártója vagy egy felhatalmazott kereskedő nyithatja ki.

Tisztítás

A fürdőkád-emelőt használat után azonnal meg kell tisztítani (lehetőleg forró vízzel leöblítve), hogy optimális állapotban maradjon.

A fürdőkád-emelő (burkolatok nélkül) tisztításához kérjük, használjon súrolószert nem tartalmazó háztartási tisztítószereket, kereskedelemben kapható fertőtlenítőszereket vagy a Drive DeVibiss Healthcare aktív habosító tisztítószert.

Kérjük, öblítse le a fürdőtermékek (pl. szappanok, bőrpuhító szerek stb.) maradványait, különösen a tapadókörongokról.

A huzatok ápolása

A levehető huzatok anyaga sima felületének és antibakteriális tulajdonságainak köszönhetően higiénikus.

A huzatok ápolása rendszeres tisztítást igényel, akár kézzel, akár mosógépben, 60 °C-on. Használjon enzimentes, nem biológiai mosószert. Vegye figyelembe, hogy a fürdés során használt, olajat tartalmazó fürdőadalékok foltot hagyhatnak a huzaton. A huzatok rendszeres tisztításának elmulasztása szintén elszíneződéshez vezethet.

Megjegyzés: A huzatok elszíneződése nem tartozik a garancia hatálya alá, mivel ezek fogyóeszközök.

- A huzatok tisztítás céljából könnyen eltávolíthatók.
- A huzatokat ne szárítsa szárítógépben; helyette akassza ki száradni.
- Kereskedelemben kapható fertőtlenítőszer használata ajánlott.

Új dugók felszerelése a fürdőkád-emelő burkolatára

- Először vezesse be az új dugót felülől a párna lyukán keresztül, majd nyomja rá az alátétet az aljára megerősítés céljából (22–23. kép).



A töltőegység és az akkumulátor javítása / karbantartása

A töltőegység karbantartása

A töltőegység karbantartásmentes. A házat kizárólag oldószermentes tisztítószerrel vagy enyhén nedvesített ruhával szabad megtisztítani, ügyelve arra, hogy a folyamat során ne kerüljön nedvesség a készülékbe. **A töltőegységet használat előtt gondosan szárítsa meg.** Előfordulhat, hogy a tápegységet néhány órára száraz, szellőző helyre kell helyezni, anélkül, hogy csatlakoztatná az áramellátáshoz.

Fontos:

A tisztítás előtt a töltőegységet ki kell húzni a hálózati aljzatból.

Az akkumulátoros kézi vezérlő feltöltése

Az optimális teljesítmény érdekében ajánlott az akkumulátort minden használat után teljesen feltölteni. A teljesen feltöltött akkumulátor a felhasználó súlyától függően körülbelül 6 fürdőre elegendő. A töltőegységen feltüntetett feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel.

1. Csatlakoztassa az akkumulátoros kézi vezérlő végén található spirálkabel csatlakozóját a töltőegység aljzatához.
2. Csatlakoztassa a töltőegységet a hálózati aljzathoz.
3. A kézi vezérlőn lévő jelzőfény piros színű marad, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődik. Ezután zöldre vált, jelezve, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve és használatra kész. Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 4 órát vesz igénybe. Ezután a töltési folyamat leáll, hogy elkerülje az akkumulátor túltöltését.
4. Húzza ki a töltőegységet a hálózati aljzathoz.
5. Válassza le a töltőt a kézi vezérlőről úgy, hogy kihúzza a csatlakozót a csatlakozóaljzathoz.

Fontos információ:

Ha a kézi vezérlő csatlakoztatása után a töltésjelző nem világít, kérjük, ellenőrizze a következőket:

- A csatlakozások állapota (a csatlakozó teljesen be van dugva a töltőaljzatba).
- Ellenőrizze, hogy a kézvezérlő tekerceselt kábele, amely a női csatlakozóhoz van rögzítve, valamint a töltőkábel és a hálózati töltőegység nem sérült-e.

Megjegyzés: Ha ezek közül bármelyik alkatrész sérült, küldje vissza a forgalmazónak ellenőrzésre.

A fürdőkád-emelő biztonságos szállítása

1. Válassza le a kézi vezérlőt a fürdőkád-emelőről.
2. Vegye le a fürdőkád-emelő háttámláját az ülésről/alapról.
3. Szállítás közben (pl. járműben) mindig rögzítse biztonságosan a fürdőkád-emelő alkatrészeit a sérülések elkerülése érdekében.
4. Ha a kézi vezérlő alacsony hőmérsékletnek van kitéve (például télen hosszabb ideig járműben vagy épületben tárolják), hagyja szobahőmérsékletre melegedni, és szükség esetén töltsse fel.

Műszaki adatok	
Teljes hossz	95 cm
Teljes szélesség	70 cm
Ülésszélesség	38 cm
Ülésmélység	52,5 cm
Az ülésfelület teljes hossza	61 cm
Ülésmagasság, min.	6,5 cm
Ülésmagasság, max.	48 cm
Háttámla magassága	67,5 cm
Háttámla szélessége	28,5 – 35 cm
Háttámla állítása	10° – 50°
Alaplemez szélessége	30 / 31 cm
Alaplemez hossza	60 cm
Max. terhelés	170 kg
Teljes súly kézi vezérlés nélkül	9,5 kg
Teljes tömeg kézi vezérléssel együtt	9,9 kg
Védelmi osztály	IP X7

Működési környezeti feltételek	
Hőmérséklet	+10° – +50°
Relatív páratartalom	10 – 100%
Légnymás	700 hPa – 1060 hPa

Szállítási és tárolási környezeti feltételek	
Hőmérséklet	-10 °C – +40 °C
Relatív páratartalom	10–100%
Légnymás	700 hPa – 1060 hPa

Hulladékkezelés

Ha már nincs szüksége a termékre, kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakkereskedőjével, vagy vigye el a terméket a helyi hulladékkezelő központba.

A meghibásodott alkatrészeket és akkumulátorokat engedélyezett hulladékkezelő központokban kell ártalmatlanítani.

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni, hanem egy megfelelő hulladékgyűjtő helyre vagy forgalmazóhoz kell leadni. A fürdőkad-emelőre a hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2002/96/EK irányelv vonatkozik, és 2015. augusztus 13. után került forgalomba.

Szakkereskedője:



drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44
88316 Isny/Allgäu •
Németország T +49 7562
9724 0
info@drivemedical.de
www.drivedevilbiss.de



Hibák és változtatások fenntartva • Verzió: MDR 1.0 • 2022.08.29



Cikkszám: 470900124