


Használati utasítás DINO tusoló ülőke



Azok számára javasolt a termék használata, akik valamilyen okból segédeszköz használatára szorulnak tusolás közben. például járási bizonytalanság. Azok számára, akik számára az ülő helyzetben is bizonytalanok, azoknak háttámaszos és kartámaszos segédeszközt javaslunk.

Összeszerelés:

A termék összeszerelt állapotban kerül kiszállításra, így összeszerelést nem igényel.

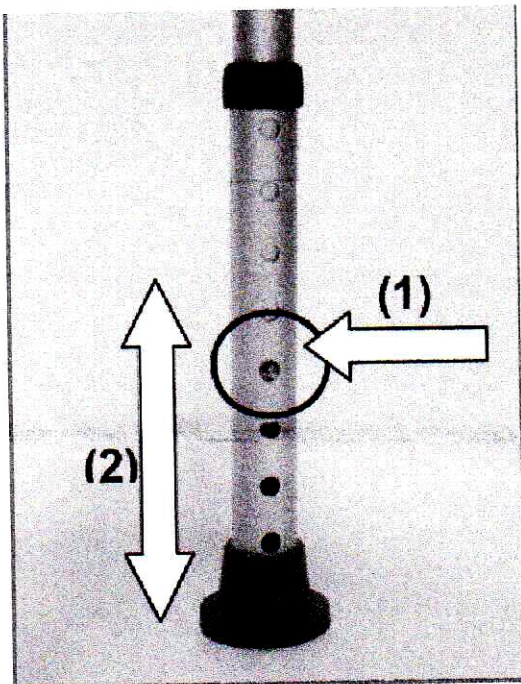

Magasság beállítása:

Használat előtt állítsa be a lábakat a megfelelő magasságba. Nyomja be a képen 1-es számmal jelzett állító gombot, majd mozgassa a lábat a kívánt hosszra. Ezt követően a furatba biztonságosan engedje vissza az állító gombot. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a szék stabil és mind a négy láb azonos hosszra került-e beállításra.

Biztonsági tanácsok:

Sérült terméket ne használjon, mert balesetet okozhat.
Maximális terhelhetőség: 130 kg.

Tisztítás:

Nedves ronggyal és általános tisztító szerrel rendszeresen tisztítsa meg a széket. Ne használjon súroló szert.

Orvostechnikai gyógyászati segédeszköz, használatáról kérdezze meg kezelőorvosát. Mindenben megfelel az Európai Tanács 94/42/EEC orvostechnikai eszközökre vonatkozó irányelveinek.

Technikai adatok:

Terhelhetőség: 130 kg.

Ülőlap átmérő: 32 cm

Teljes átmérő a lábknál: 45 cm

Ülőlap vastagsága: 2,7 cm

ülőlapp magassága a talajtól: 34-52 cm

Szín: Fehér

Súly: 1,6 kg

Váz: alumínium.

Garancia. 24 hónap, anyag meghibásodásra.

Eladás dátuma: _____

Forgalmazó: _____

MEDIGOR
www.gyogyszati.hu

MEDIGOR BT
8200 Veszprém,
Bezerédi u. 2.
www.gyogyszati.hu
Tel: 88/412-186
Mobil: 30/906-1006
Email:
info@gyogyszati.hu