

ALUMINIUM ÖSSZECSUKHATÓ MENEKÍTŐSZÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

I. Technikai paraméterek

- 1. Termék méret:** (Hosszúság x szélesség x magasság)
69x51x90 cm
- 2. Összeceukható méret:** (Hosszúság x szélesség x magasság) 18x51x90cm
- 3. Súly:** Nettó súly:11Kg Összsúly: 13Kg
- 4. Maximális teherbírás:** ≤ 159Kg



II. Használat:

A hordágy nagy szilárdságú alumínium ötvözetből készült. Ez egy ideális eszköz a sürgősségi személyzet számára, hogy szállítsák a sérültet fel és le a lépcsőkön.

A két álló hátsó kerék lehetővé teszi, hogy a sérült könnyedén átmozgassák a legtöbb felszínen. A hordágy lehetővé teszi a sérült biztonságát szállítás közben a 3 biztonsági övnek köszönhetően gyors kioldó csattal. A szék elején található két felemelő rúd. A hordágy összeceukható és helyet spórolhat .

III. Alkalmazás

Klinikai gyakorlatra jóváhagyva, ez az eszköz alkalmas mentő, kórház, harctér, tornaterem sebesültjeinek elszállítására.

IV. Figyelmeztetések

Az eszközzel való beteg szállítása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a biztonsági övek alaposan be vannak állítva és csatolva.

V. Karbantartás

1. Tisztítsa rutinszerűen (beleértve: fertőtlenítés)
2. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész

VI. Tárolás és szállítás

1. Tárolja az eszközt nedves és korróziómentes környezetben.
2. Általános szállítóeszköz képes szállítani a terméket.