

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NEOPRÉN TÉRDTÁMASZTÓ "LIGAMAX TÉRD" O- 1201

**FIGYELEM!** A termék első használata előtt kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Vásárláskor kérjük, ellenőrizze a termék teljességét és minőségét. Bármilyen aggályát jelezze a termék forgalmazójának. Mennyiséggel/minőséggel kapcsolatos aggályok esetén kérjük, kövesse a jótállási jegyen található utasításokat, azaz mutassa be a vásárlást igazoló bizonylatot és a kereskedő által kitöltött jótállási jegyet.

I. TERMÉKLEÍRÁS

A "LIGAMAX TÉRD" neoprén térdtámasz prémium neoprénből készült.


Nyitott kialakításának köszönhetően a támasz tökéletesen illeszkedik a végtaghoz. A tépőzáras rögzítés lehetővé teszi az állítható stabilizálást a mozgásszabadság korlátozása nélkül, a szilikongyűrű pedig ezenkívül enyhíti a térdkalácsra nehezedő nyomást.

II. JELLEMZŐK

A támasz szorosan illeszkedik a térdhez, kiváló ízületi támasztást biztosítva. A vérkeringés javításával fenntartja a megfelelő testhőmérsékletet, ami jelentősen csökkenti az ízület duzzanatát és merevségét, valamint enyhíti a fájdalmat. A térdkalács körüli szilikongyűrű csökkenti a nyomást és szabályozza a térdkalács-combcsontról az ízületet.

III. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Győződjön meg arról, hogy a termék mérete megfelelően van kiválasztva.
- Felvétel előtt oldja ki az összes tépőzáras rögzítőt, és hagyja lazán őket.
- Helyezze a térdkalácsot a fűző nyílásába.
- Rögzítse a középső tépőzáras pántot hátul, a térdhajlat magasságában.
- Rögzítse a többi tépőzáras pántot a térdkalács felett és alatt.

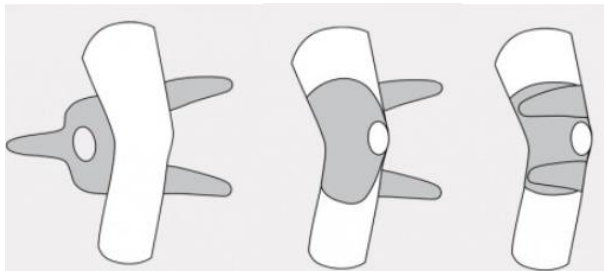

IV. Méret táblázat

Méret	Térd kerülete a térdkalácsnál
1	32-43 cm
2	44-54 cm

V. ÖSSZETÉTEL

100% neoprén

VI. HASZNÁLATI SZABÁLYOK

- Ezt a terméket csak orvos utasítása szerint szabad használni,
- A fűző felhelyezésének módját szakképzett orvosi személyzetnek kell bemutatnia, a felhasználót ellátó személy jelenlétében (ha van ilyen),
- A terméket és alkatrészeit csak rendeltetés szerűen szabad használni,
- A terméket közvetlenül a testen kell viselni,
- A terméket a jelen kézikönyvben és a terméken található címkén található ajánlásoknak megfelelően kell tisztán tartani. A termék nem megfelelő tisztítása és karbantartása bőrkárosodást okozhat,

VII. HASZNÁLAT

A termék használható:

- Megelőzőképpen sport és fizikai aktivitás során,
- Gipsz utáni rehabilitáció során,
- Térdízületi instabilitással járó rendellenességek esetén,
- Enyhe térdízületi ficamok és szalagsérülések esetén.

VIII. ELLENJAVALLATOK


















- Ha bőrkárosodások jelentkeznek az ortézis rögzítési területein, annak használata korlátozott, és csak orvosi felügyelet mellett lehetséges.
- Az ortézis használatát a kezelőorvosnak kell értékelnie különböző eredetű memóriazavarokban szenvedők, mentális zavarokkal küzdők és gyermekek esetében.

IX. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A termék rendszeres mosása ajánlott. Mosás előtt zárja be az összes tépőzárát.

- Kézzel mosható legfeljebb 30°C-on, semleges, antiallergén mosószerrel.
- Langyos vízben öblítse le; ne használjon öblítőt.
- Ne fehéritse.
- Ne vasalja.
- Ne vegytisztítsa.
- Ne szárítsa szárítógépben.
- Szárítsa fekvő, árnyékos, jól szellőző helyen – ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek.

JELMAGYARÁZAT

	Gyártó
	CE jelölés
	Referenciaszám
	Gyártási dátum
	Lásd a használati utasítást
	Figyelmeztetés
	Tételszám
	Felhajtva, ne fordítsa meg
	Száraz helyen tárolandó
	Kénes, óvatosan kezelendő
	Ne vágja ki
	Újrahasznosítható csomagolás
	Kézzel mosható
	Ne fehérítse
	Ne vasalja
	Ne vegytisztítsa
	Ne szárítsa szárítógépben



REHA FUND Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
 tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
 e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl

Ver. 1.1
 Wydano:



GARANCIAJEGY
NEOPRÉN TÉRDTÁMASZTÓ
"LIGAMAX TÉRD" O-1201

Model:	Sorozatszám:	Eladás dátuma:	Eladó aláírása és bélyegzője:

GARANCIA FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

- A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen garanciajegyben szereplő termék vadonatúj és kiváló minőségű.
- A termékre a garanciajegyben feltüntetett eladási dátumtól számított 12 hónapos garancia vonatkozik.
- A garanciális igényt csak akkor vesszük figyelembe, ha a vásárlást igazoló bizonylattal együtt megfelelően kitöltött garanciajegyet nyújtanak be.
A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy hivatalos szerviztechnikusai javítják ki, feltéve, hogy a terméket rendszereszerűen és a használati utasításnak megfelelően használták.

5. A javítást/cserét a lehető leghamarabb, de legfeljebb 14 napon belül elvégezzük attól a dátumtól számítva, hogy a berendezést a szervizközpontba átvették.

6. A jótállás nem terjed ki:

- a használati utasításban leírt karbantartással, tisztítással és szijbeállítással kapcsolatos tevékenységekre;
- a normál használat során kopásnak és elhasználódásnak kitett alkatrészekre;
- a szij mechanikai és hőkárosodására, pl. törés, szakadás stb.;
- a berendezés használati utasítással ellentétes használatából, gondatlanságból, jogosulatlan javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő károokra.

7. Mielőtt a berendezést hivatalos szerviztechnikusoknak visszaküldené, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy alkalmas legyen a szervizvizsgálatra.

8. A javításokat és cseréket a Reha Fund Sp. z o.o. hivatalos szerviztechnikusainak kell elvégezniük. 9. Alaptalan reklamáció esetén a szállítási költségek a vevőt terhelik.

10. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.

11. Az eladott árukra vonatkozó jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevő azon jogait, amelyek az áru szerződésnek való nem megfelelőségéből erednek.

SZERVIZ JAVÍTÁSI LISTA (a szervizközpont tölti ki)

Szám.	Értesítés dátuma	Rendelési szám	Hiba leírása/Javítás terjedelme	Javítás dátuma	Szervizközpont bélyegzője és aláírása
1.					
2.					