

## KÉZIKÖNYV ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### FELFEKVÉS ELLENI MATRAC REF. : SY200

#### TERMÉKJELLEMZŐK:

Kedves vásárlónk, ez a termék egy orvostechnikai eszköz, mindenben megfelel az Európai Unió 93/42/EEC vonatkozó irányelveinek. Használata előtt részletesen olvassa el a használati útmutatót. Használatát tekintve kérje ki orvosa tanácsát. A kompresszorral ellátott változó nyomású matrac első stádiumú felfekvésre vagy felfekvés megelőzésére használható hosszú távon és otthoni használatra. A cél, hogy egy lágy masszázssal csökkentsük a testfelületre nehezedő nyomást, mely javítja a vérkeringést és a vér oxigén szállítását.



#### A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT

1. A csomagolás kibontásakor győződjön meg a készülék és a műanyag részek sértetlenségéről, ha bármilyen hibát tapasztal, akkor ne használja a terméket.
2. Tartsa távol a gyerekektől.
3. Hibás működés esetén lépjen kapcsolatba az eladóval.
4. A termék nem megfelelő használatáért a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget.
5. A terméket a rendeltetésének megfelelően kell használni.

FIGYELMEZTETÉS: ne használja a készüléket, ha a csatlakozó sérült illetve törött alkatrész esetében, ne tegye ki víz hatásának. Bármilyen hiba tapasztalása esetén lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.



#### FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves környezetben, érzéstelenítő gázok és gyúlékony anyagok jelenlétében.



#### JELEK JELENTÉSE

	Követnie kell az utasításokat.
	A termék használatához hasznos információkat talál.
	Általános figyelmeztetés.
	Bekapcsolás.
○	Kikapcsolás.
	BF eszköz.
	Nyomás növelésének iránya.
	Hulladékkezelés a 2002/96/CE direktíva alapján.
	Kettős szigetelés.



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. A kompresszort helyezzük el horizontálisan, vagy a speciális akasztóval függesszük az ágy végéhez.
2. A matracot terítsük ki az ágyra, ügyeljünk arra, hogy a csövek nem törtek meg vagy csavarodtak. A matrac két végénél található sík felületet helyezzük az ágy saját matraca alá. A kompresszorhoz csatlakoztassuk a matrac két csövét.
3. Dugjuk be a kompresszort, majd nyomjuk meg az ON gombot. A kompresszoron található szabályozó állítsuk a maximumra. 20 perc alatt a matrac teljesen felfújódik.
4. Mindig használjon lepedőt a matrac és a beteg között.
5. A nyomás szabályozót állítsuk a kívánt fokozatra a beteg súlyának megfelelően (lásd táblázat!).



## NYOMÁS SZABÁLYOZÁSA

SÚLY	POZÍCIÓ
50KG	1-2
50KG-65KG	3-4
65KG-85KG	5-7
85KG-100KG	8-10



## MŰSZAKI JELLEMZŐK

KOMPRESSZOR	MATRAC
Gyártó: RICANT SNC	Forgalmazó: MEDIGOR BT
Termék kód: : SY200	Termék kód: U00012874
Használat: kompresszor felfekvés elleni matrachoz	Használat: felfekvés elleni matrac
Áramellátás: 230V~ -50Hz	Méret: 200cmx88cmx7cm +90cm szegély
Levegő kibocsátás: 5 liter/perc	130 elemből
Nyomás terjedelem: 40 mmHg + 120 mmHg	Anyag: PVC
Ciklus idő: 12 perc	PVC vastagság: 30 mikron
Áram fogyasztás: 7W	Szín: bézs
Elektromos biztonsági osztály: II	Súly: 2,3 kg
Védelem: F500 mA biztosíték	Javító szettet tartalmaz
Méret: 245(H)mm x 111 (SZ)mm x 80(M)mm	Kompresszor csatlakozás speciális csővel
Csomagolás: ABS	Használó súlya :50kg- 100kg
Súly: 1,4kg	Származási hely: Kína
Származási hely: Kína	

Használati feltételek:

Szoba hőmérséklet: 10°C + 35°C

Páratartalom: 20 + 80%

Tárolási és szállítási feltételek:

Szoba hőmérséklet: -15°C+50°C

Páratartalom: 10 + 90%



## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A termék nem igényel karbantartást.

**A matrac tisztításához** kérjük használjon semleges tisztítószeret, nedves ruhával vagy közönséges fertőtlenítőszerrel. Ne használjon maró hatású tisztítószeret, amely károsíthatja a matracot.

**A kompresszor tisztításához** enyhén nedves ruhát használjon. Ne használjon semmiféle tisztítószeret.

## FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Az eszköz nem kapcsol be	Ellenőrizze az áramforrást és, hogy be van-e dugva a készülék
A matrac nem fújódik fel	Bizonyosodjon meg, hogy a csövek megfelelően csatlakoztatva vannak a kompresszorhoz, nincsenek megtörve és semmi sem okozhatott dugulást

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

**A termékre 1 év garancia vonatkozik, mely a számlával együtt érvényes.**

A jótállási időszak alatti javítás nem növeli meg a garancia időtartamát.

A szállítási költségek/a termék eljuttatása a forgalmazóhoz a jótállás időszaka alatt is a vevőt terheli.

Nem megfelelő használatból, vagy a termék átalakításából származó hibák megszüntetik a garanciát a termékre!

A garancia akkor is megszűnik, ha a regisztrációs számot eltávolították vagy módosították.

Eladás kelte: : \_\_\_\_\_

Eladó szerv. \_\_\_\_\_