



ELEKTROMOS KEREKESZÉK

0811316

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Előszó

Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, mielőtt használatba venné a terméket.

- Ez a kézikönyv tartalmazza a működési, összeszerelési és egyszerű hibaelhárítási útmutatókat.
- Ez a kézikönyv a következő modellekre vonatkozik: 0811316.
- Ez a kézikönyv a kerekesszék karbantartását és önellenőrzési módszereit tartalmazza, kérjük, tegye el a megfelelő helyre.

- Kérjük, adja át ezt a kézikönyvet referenciaként, amikor mások is használni fogják ezt a kerekesszéket.
- A kézikönyvben található megjegyzések és illusztrációk kissé eltérhetnek a valódi alkatrészekről a minőségfejlesztés vagy a tervezés változása miatt. Kérjük, a természetben leírtak az irányadók.
- Bármilyen kétértelműség vagy kérdés esetén forduljon a kereskedőhöz.
- Bármely jármű nem megfelelő használata sérüléshez vezethet. A nem biztonságos vezetés Önt és másokat is megkárosíthat.
- Az elektromos kerekesszék járási nehézségekkel küzdő vagy járásképtelen személyek kényelmes szállítására szolgál.
- Ez az elektromos kerekesszék csak 1 személy szállítására szolgál.

A kézikönyvben használt szimbólumok



Figyelmeztető szimbólum

Kövesse pontosan a szimbólum melletti utasításokat.

Az utasítások be nem tartása személyi sérülést, a kerekesszék vagy a környezet károsodását okozhatja.

1. Termékbemutató

1.1 Termékképek



1.2 Termékinformációk

Teljesítményparaméterek

0811316	SPECIFIKÁCIÓ
Váz	Alumínium, porfestett
Vezérlő	50A
Motor	Linux 200W*2 elektromágneses fékkel
Akkumulátor	Lítium 24V 20AH
Töltő	HP 24V 3A
Maximális sebesség	7 KM/H
Hatótávolság	15-20 KM
Kapacképesség	10 fok
Első kerék	8" PU (20 cm)
Hátsó kerék	12" tömör PU gumibroncs (30,5 cm)
Kartámasz	Visszahajtható kartámasz
Lábtartó	Be- és hátrahajtható, sarokpánttal
Ülés	Levehető üléspárna
Egyéb funkciók	Sárvédő, borulásgátló kerekek, biztonsági öv

Termékteljesítmény

Ez az elektromos kerekesszék-sorozat akkumulátorral és motorral működik. A felhasználók joystick vezérlővel szabályozhatják az irányt és állíthatják be a sebességet. Alkalmas alacsony sebességű, jó útviszonyok melletti és kis emelkedőn való használatra.

Fő szerkezet

Ez az elektromos kerekesszék-sorozat főként két részből áll:

- 1) Vázrész: váz, kerék, lábtartó, kartámasz, háttámla stb.
- 2) Elektromos rész: vezérlő, motor, akkumulátor.

Alkalmazási terület

Elektromos kerekesszékünket mozgáskorlátozottak és idősek (120 kg-nál kevesebb) számára terveztük járóeszközként, kültéri, közepes távolságú használatra alkalmas. Ne használja autópályán.

2. Biztonsági utasítások

2.1 Vezetési figyelmeztetés

Általános vezetési óvintézkedések

- Kérjük, tartsa a kezét a kartámaszon a kerekesszék irányításához.
- Kérjük, gyakoroljon parkokban vagy más biztonságos, nyílt helyeken, amíg ügyesen nem tudja használni a kerekesszéket.
- Gyakorolja a vezetést biztonságos helyen, hogy elsajátítsa az előrehaladás, a megállás és a fordulás elvét.
- Mielőtt útra indulna, kérjük, kísérje gondozója, és győződjön meg arról, hogy biztonságos.
- Kérjük, szigorúan tartsa be a gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályokat, ne tekintse magát járművezetőnek.
- Kérjük, a járdán és a zebrán közlekedjen. Ne haladjon a járműsávban.

- Vezessen egyenletesen, kerülje a Z vonalban való hajtást vagy az éles kanyarokat.
- Kérjük, tartsa a gumiabroncsok nyomását megfelelő szinten. A rendellenes gumiabroncsnyomás bizonytalan vezetést vagy túlzott áramkimaradást okozhat.

Gondozó kíséretében, vagy kerülje a vezetést ilyen körülmények között.

- Vezessen rossz időben, például esős napon, sűrű ködben, erős szélben, hóban stb.
- Ha a kerekesszék nedves, azonnal törölje fel a vizet.
- Vezessen rossz útviszonyok között, például sáros, ösvényen, homokos úton, kavicsos úton stb.
- Vezessen forgalmas úton.
- Vezessen kerítés nélküli árokban, tavon stb.
- Kerülje a vasúti átjárót. ☒ Vasúti átkeléskor álljon meg a lehajtónál, hogy megbizonyosodjon a biztonságos átkelésről, és győződjön meg arról, hogy a kerekek nem akadnak be a vasúti pályán.
- Az elektromos kerekesszék csak személyes használatra szolgál, ne szállítson vele embereket vagy árut, és ne vontatásra.

Emelkedési és lejtős óvintézkedések

- Kerülje a következő helyeken való vezetést: meredek dombok, lejtős helyek, magas lépcsők, csatornák stb.
- Kerülje a meredek lejtőkön való vezetést; a lejtésszögnek kevesebbnek kell lennie, mint 9 fok. Kérjük, óvatosan kezelje a vezérlőt lejtőn való vezetéskor.
- Emelkedésben vagy lejtőben haladjon előre.
- Lejtmenetben lassítson.
- Kerülje az oldalirányú vezetést meredeken.
- Tilos a lépcsőn való vezetés, és kerülje a magas lépcsők átkelését.
- Kerülje a széles árkok átkelését.
- Árkok átkelésakor tartsa a 90°-os szöget a kerekek és az árkok között.



Ne állítsa a kerekesszéket kézi üzemmódba emelkedőn vagy lejtőn.

Ha a kerekesszék meghibásodik egy átkelőhelyen, kérjük, azonnal kérjen segítséget a járókelőktől.

Állítsa a kerekesszéket kézi üzemmódba, majd tolja a kerekesszéket a helyszín elhagyásához, vagy a felhasználót, hogy azonnal vigye el a helyszínről egy biztonságos helyre.

Óvintézkedések a gondozók számára

- A gondozóknak meg kell győződniük arról, hogy a felhasználók lábai a lábtartókon vannak, és gondoskodniuk kell arról, hogy a ruházatuk ne akadjon a kerekekhez.
- A gondozóknak tolniuk kell a kerekesszéket előre, hogy biztonságban legyenek meredek lejtőn vagy hosszú lejtőn.

2.2 Egyéb figyelmeztetések

Javítás és felújítás

Ha javításra vagy módosításra van szükség, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével. Ne végezzen saját kezűleg módosítást, mert balesethez vagy meghibásodáshoz vezethet.

Környezetvédelem

A környezet védelme érdekében ne dobja ki véletlenül az elhagyott kerekesszéket és a leselejtezett akkumulátort. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével az új akkumulátor cseréjéért.

A tárolási környezetet tartsa szárazon

Ne tárolja a kerekesszéket nedves helyen, például fürdőszoba közelében. Ha a kerekesszék nedves lett az esőben, azonnal törölje le a vizet.



*Ne cseréljen véletlenszerűen alkatrészeket vagy anyagokat.
Ne helyezzen súlyt véletlenszerűen, mert ez egyensúlyhiányt okozhat.
Ne használjon más járművet a kerekesszék húzásához vagy tolásához, ha valaki ül a kerekesszékben, vagy ha a kerekesszék kézi üzemmódban van.
Rendellenes hang esetén azonnal hívja a szervizt.*


Elektromágneses interferencia elleni védelem

A kerekesszéket tartsa távol erős mágneses mezőktől és nagy induktív elektromos berendezésektől, például rádióállomástól, tévéállomástól, földalatti rádióállomástól, mobiltelefon-adóállomástól. Ügyeljen arra, hogy ha a közelben elektromágneses interferencia források vannak, akkor a lehető legtávolabb legyen ezektől a forrásoktól, hogy elkerülje az elektromágneses interferenciát. Az elektromos kerekesszéknek kerülnie kell az elektromágneses interferenciát.

3. A kerekesszék beállítása


A kerekesszék összecsuksása

1. lépés: Kapcsolja be felfelé az 1. képen látható módon.

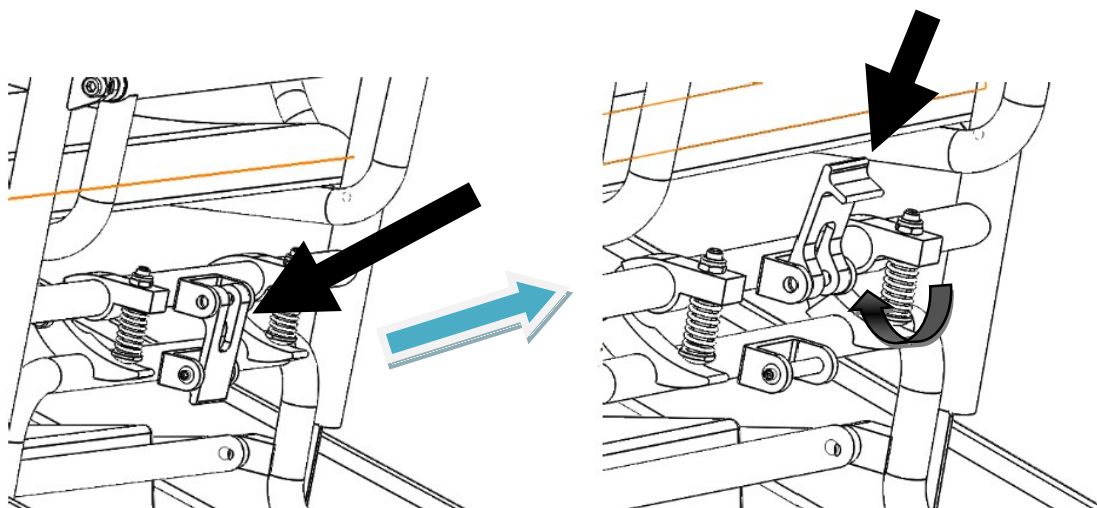

1. kép


2. lépés: Nyomja össze a háttámla csövét a 2. képen látható módon, hogy teljesen összehajtható legyen.

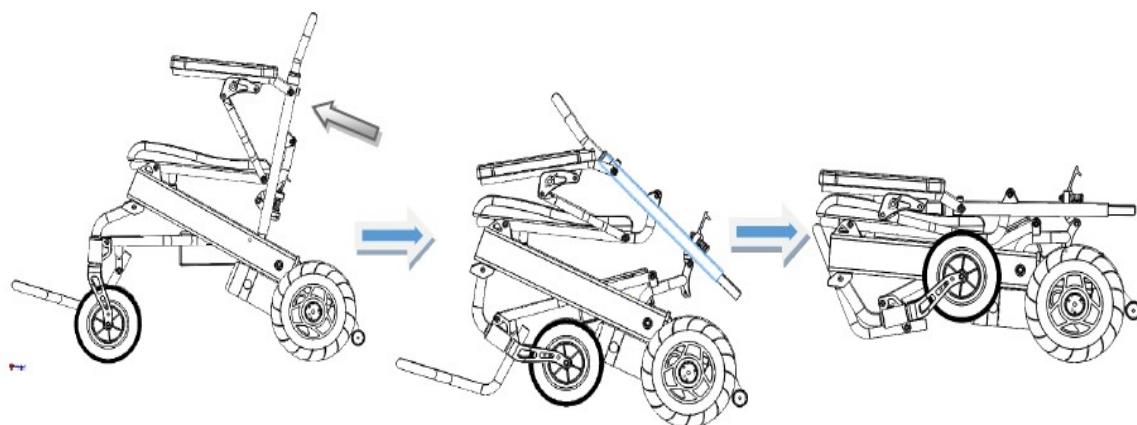


2. kép

Kartámasz használata

1. lépés: Fordítsa lefelé a gombos kapcsolót

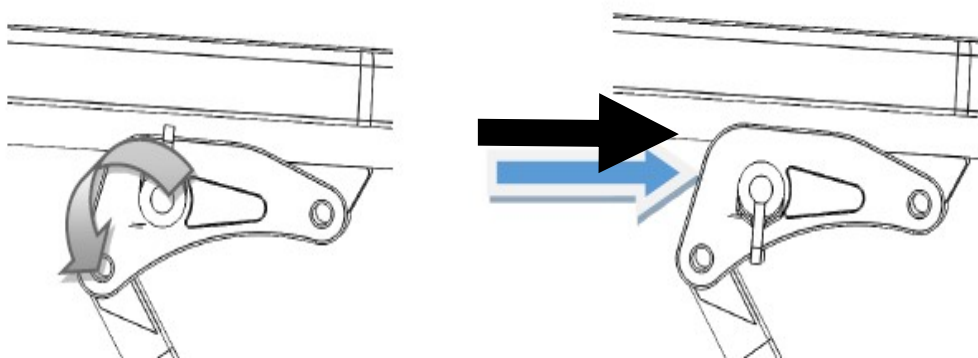

2. lépés: Emelje fel a kartámaszt

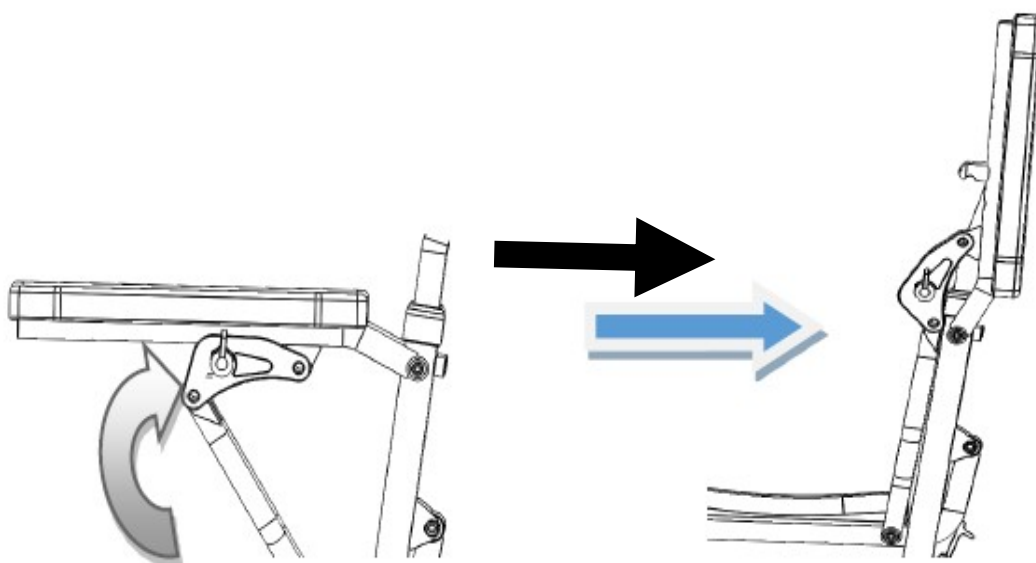

A joystick beállítása

Helyezze a vezérlő alatti csövet a kartámasz alatti csőbe. Állítsa be a vezérlőt a tökéletes helyzetbe az anya óramutató járásával ellentétes irányú csavarásával (3. kép). A beállítás befejezése után húzza meg szorosra az anyát.



3. kép

Váltás manuális és elektromos üzemmód között



Manuális módról elektromos módra való váltáskor kérjük, ellenőrizze, hogy mindkét oldalsó tengelykapcsoló a hornyokban van-e. Bármelyik oldalsó tengelykapcsoló nincs teljesen a hornyokban, felborulás veszélyt okozhat.

Manuális mód: kapcsolja ki az áramellátást és állítsa le a kerekesszéket, forgassa el az állítókarokat, hogy a sárga címke felé mutassanak. (4-1. kép)

Elektromos mód: forgassa el az állítókarokat, hogy a zöld címke felé mutassanak. (4-2. kép)



4-1. kép



4-2. kép

„ZÖLD CÍMKE”



Ne kapcsolja a kerekesszéket kézi üzemmódba, ha lejtőn vezet.

4. Akkumulátor és töltő

4.1 Akkumulátor

Az akkumulátorok már össze vannak szerelve. Az akkumulátorok mozgatása nélkül összecusukható.

4.2 A töltő követelményei

A töltő az akkumulátor töltésére szolgál. Töltés közben ne használja.

A töltő műszaki adatai

Bemeneti feszültség: AC220V $\pm 10\%$ Kimeneti feszültség: 24V/DC Kimeneti áram: 3A

4.3 A töltő használata

Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a töltőt a tápegységhez és az akkumulátordoboz csatlakozójához. A töltési folyamat befejezéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

1. lépés: Győződjön meg arról, hogy a töltő hornya nincs eltömődve.
2. lépés: Győződjön meg arról, hogy az elektromos kerekesszék ki van kapcsolva.
3. lépés: Húzza ki az akkumulátordobozt és a vezérlőt összekötő csatlakozókat.
4. lépés: Csatlakoztassa a töltő kimeneti csatlakozóját az akkumulátordoboz tápcsatlakozójához.
5. lépés: Csatlakoztassa a töltő fő csatlakozóját a tápegységhez, és a piros lámpa világítani fog. A teljes töltés 8-10 órát vesz igénybe, ne töltse túl 24 óránál tovább.
6. lépés: Az akkumulátor élettartamának rövidülésének elkerülése érdekében kérjük, töltse fel az akkumulátort legalább havonta egyszer, amikor a kerekesszéket nem használja.



Ne állítsa le a töltést, amíg a töltési folyamat be nem fejeződött. A nem teljesen feltöltött akkumulátor ismételt használata lerövidíti az akkumulátor élettartamát, ezért az akkumulátort a lehető legjobban fel kell tölteni.

Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a tápellátás jelzőfénye zöldre vált. Ne állítsa le a töltést a teljes feltöltés előtt.

A töltés befejezése után kapcsolja ki a tápellátást, különben az akkumulátor lassan lemerül. Ne töltse 24 óránál tovább. A túltöltés veszélyes.



A felhasználóknak a töltési veszélyek elkerülése érdekében a következő szabályokat kell betartaniuk:

Az elektromos kerekesszék nem tartalmaz töltőt, kérjük, használjon olyan országos szabványú töltőt, amelynek kimeneti feszültsége 24 V, 3 A.

Töltés közben jól szellőző helyen kell lennie. Ne tegye ki a kerekesszéket napfénynek és párák környezetnek.

A töltési környezet hőmérséklete 10 °C és 50 °C között van. Ha a hőmérséklet a környezeti tartományon kívül esik, az akkumulátor nem fog megfelelően működni, és könnyen károsíthatja azt.

A ventilátor hangja töltés közben normális jelenség. Ez a töltő hűtésére szolgál, kérjük, ne aggódjon emiatt.

Töltés közben ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a töltőbe. Továbbá ne helyezze a töltőt gyúlékony tárgyakra, például üzemanyagra, lábtartóra vagy ülészárnára.

4.4 Az akkumulátor használata és karbantartása

Az akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyt okozhat. Csak azonos vagy az ajánlott típusú akkumulátor cserélhető. Ezenkívül győződjön meg arról, hogy az akkumulátor pólusai megfelelőek. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához fontos szempontok: gyakran töltsse fel, hogy az akkumulátor töltöttsége magas maradjon. Ha a kerekesszéket nem használja, akkor a legjobb, ha teljesen feltölti az akkumulátort. Ha hosszabb ideig nem használja, akkor havonta kétszer érdemes tölteni.



Az akkumulátor töltése közben tartsa távol a lángtól. A láng akkumulátortűzet vagy robbanást okozhat.

A töltés hidrogént termel. Töltés közben ne dohányozzon.

Ne húzza ki a tápegységet a konnektorból, ha nedves a keze, mert áramütést okozhat.

Kiszámíthatatlan baleset esetén, amely sérülést okozhat a felhasználónak, ne használja és ne üljön rá az elektromos kerekesszékre töltés közben.

5. Rendszerdiagnózis

Ha a jelzőfények villognak, az azt jelenti, hogy a kerekesszékekben rendellenességek vannak. A rendellenességek a következő alkatrészekben fordulhatnak elő: motorok, fékek, akkumulátor, kábelcsatlakozások stb.

A termék belső információ-lekérdezésén keresztül a diagnosztikai jel segítségével kimutatható a rendellenes állapot tulajdonságai. A rendellenes helyzet más szervizeszközök nélkül is kimutatható.

Hangjelzés

A LED-lámpa leírása	A LED-lámpa jelentése	Magyarázat és megoldás
Egyik LED sem világít, és nincs hang.	A készülék ki van kapcsolva, a kerekesszék készenléti vagy alvó üzemmódban van. Gyenge az érintkezés a tápellátással kapcsolatban. A biztosíték kioldott vagy kiégett.	
Minden LED világít	A készülék be van kapcsolva, az öndiagnózis sikeres, az elektromos kerekesszék megfelelően működik.	Kevesebb LED világít, kevesebb akkumulátortöltöttség van hátra.
A bal szélső piros LED világít.	Az akkumulátor töltöttsége rendkívül alacsony.	Azonnal töltsse fel. Vagy az akkumulátor meghibásodott, és nem tölthető.
Két rövid sípolás, öt jelzőfény kétszeri villanásával	A bal oldali motor meghibásodott.	A bal oldali motor rosszul van csatlakoztatva, vagy a vezeték

		nincs csatlakoztatva.
Négy rövid sípolás, öt jelzőfény négyszer villog	A jobb oldali motor hibásan működik.	A jobb oldali motor rosszul van csatlakoztatva, vagy a vezeték nincs csatlakoztatva.
Hat rövid sípolás, öt jelzőfény hatszor villog	A vezérlő túláramvédelmi állapotban van.	Ellenőrizze a fékeket, és ellenőrizze, hogy a motorhajtás mechanizmusa nem ragadt-e be. Ellenőrizze az áramerősséget ampermérővel. Ha nem túl nagy az áramerősség, akkor valószínűleg a vezérlő hibásodott meg.
Hét rövid sípolás, öt jelzőfény hétszer villog	A joystick hibásan működik	A joystick nem áll vissza alaphelyzetbe, vagy a csatlakozója laza.
Nyolc rövid sípolás, öt jelzőfény nyolcszor villog	A vezérlő hibásan működik.	Kérjük, forduljon a márkakereskedőhöz karbantartás céljából.
Kilenc rövid sípolás, öt jelzőfény kilencszer villog	A vezérlő hibásan működik.	Kérjük, forduljon a szervizközponthoz karbantartás céljából.

6. Vezérlő

6.1 Vezérlőpanel



6.2 Vezérlő használata

Bekapcsoló gomb



Nyomja meg ezt a gombot, az akkumulátor töltöttség jelző lámpái balról jobbra világítani kezdenek. Nyomja meg újra, és az összes LED kialszik.



Vészhelyzet esetén közvetlenül kikapcsolhatja a készüléket a bekapcsoló gomb megnyomásával.

Alvó üzemmód

Ha a joystick 20 percnél tovább nem működik, az automatikusan kikapcsol, és a rendszer alvó üzemmódba lép. A bekapcsológomb megnyomásával felébreszthető.

Sebességállítás



A felhasználó szokásaitól és a körülményektől függően a kerekesszék vezetési sebessége állítható.

Állítsa be a sebességet a csökkentés vagy a növelés gombbal.

A sebesség öt részre van osztva, a maximális sebesség 20%-a, 40%-a, 60%-a, 80%-a és 100%-a szerint.

- Első sebességfokozat: a maximális sebesség 20%-a.

- Ötödik sebességfokozat: a maximális sebesség 100%-a.

Kürt gomb



Nyomja meg a kürt gombot, a kürt addig szól, amíg el nem engedi a gombot.

Akkumulátor töltésmérője



Bekapcsolás után az akkumulátor töltésmérője működik. Az akkumulátor töltésmérője az akkumulátor fennmaradó kapacitását is mutatja.

A képen látható módon az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Ha csak a piros vagy sárga LED világít, az akkumulátort fel kell tölteni. Hosszú távú vezetéshez az akkumulátornak teljesen fel kell töltenie. Ha csak a piros LED világít, az akkumulátor töltöttsége rendkívül alacsony, a felhasználóknak a lehető leghamarabb fel kell tölteniük az akkumulátort.

Joystick használata



A kerekesszék mozgásirányát a joystick vezérli. A joystick mozgástartománya a mozgási sebességet is szabályozza.



Kérjük, kapcsolja be vagy ki a készüléket, amikor a joystick középső helyzetben van. Ellenkező esetben a vezérlő helytelen működési jelet ad ki. Engedje el a joystickot középső állásba, és ez a hiba megszűnik. Ha a hiba továbbra is fennáll, valószínűleg ez az alkatrész hibás, ne használja a kerekesszéket, és vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel karbantartás céljából.

7. Karbantartás

A kerekesszék karbantartása magában foglalja a kerekesszék tisztítását, a kerék és az akkumulátor ellenőrzését, valamint az akkumulátor töltését. További karbantartásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével. Javasoljuk, hogy félévente ellenőrizze a kerekesszéket, és évente végezzen nagyjavítást.

7.1 Tisztítás és akkumulátor karbantartása

Tisztítsa meg a kerekesszéket

Kérjük, rendszeresen tisztítsa a kerekesszéket.

Tisztítsa meg azokat az alkatrészeket, amelyeket a felhasználó teste gyakran érint (például a háttámlát, a kartámaszt, a vezérlőt) egy tiszta és enyhén nedves ruhával. Ne használjon szerves oldószereket a tisztításhoz.

Ha beteg felhasználóról van szó, a kerekesszéket hetente egyszer kell tisztítani. Ha a kerekesszéket fertőzött személy használja, fertőtlenítőszerekkel kell tisztítani és fertőtleníteni.

Kerekek

Rendszeresen ellenőrizze a gumibroncsok légnyomását és kopási állapotát. Ha a gumibroncs futófelületének mélysége 1 mm-re csökken, kérjük, cserélje ki az abroncsot egy új gumibroncsra.

Akkumulátor

Gyakran győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében erősen javasoljuk, hogy ne töltsék, amíg teljesen le nem merül.

7.2 Kerekesszék meghibásodása és ellenőrzése

Ha a kerekesszék működése közben meghibásodás történik, kérjük, kapcsolja ki az áramellátást az ellenőrzés előtt.

Tünet: teljesen kimerül az áram, és a vezérlőpanelen található összes LED nem világít.

Ellenőrzési lépés:

1. lépés: Ellenőrizze, hogy a vezérlő csatlakozódugója nem lazult-e meg.
2. lépés: Ellenőrizze, hogy a vezérlő csatlakozódugója és az akkumulátordoboz csatlakozása laza-e. Kérjük, helyezze vissza a csatlakozódugót (a csatlakozódugó kihúzásakor fogja meg a csatlakozódugót. Ne húzza a vezetékét, hogy elkerülje a vezeték szükségtelen károsodását). A fenti ellenőrzések után, ha a kerekesszék továbbra sem tudja visszaállítani az áramellátást, vagy ha a felhasználónak bármilyen kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével.



A vezérlő diagnosztikai rendszerrel rendelkezik a vezérlő és a motor felügyeletére. Ezen alkatrészek bármilyen meghibásodását a vezérlő jelzi. További részletekért kérjük, olvassa el a hangjelzések fejezetét.

7.3 Karbantartás Ellenőrzése

Az alábbiakban egy ellenőrzőlista található. Az elektromos kerekesszéket a javaslatunk szerint rendszeresen ellenőrizni kell. Amikor fel- vagy leszáll a kerekesszékről, néhány önellenőrzés automatikusan megtörténik. A figyelmének felkeltése érdekében ezeket az önellenőrző elemeket külön felsoroljuk az A részben.

„A” terület	Használat előtt ellenőrizze a következő alkatrészek megfelelőségét: 1. Háttámla 2. Kartámasz 3. Vezérlő helyzete 4. Lábtartó 5. Akkumulátor tápellátása 6. Tengelykapcsoló/állítókar a manuális és elektromos üzemmód közötti átkapcsoláshoz
„B” terület	Az eredeti alkatrészek elvesztésének vagy kopásának elkerülése érdekében havonta ellenőrizze a következő alkatrészeket: 1. Csavarok 2. Fékek 3. Kuplung/állítókar a manuális és elektromos üzemmód közötti átkapcsoláshoz 4. Az első és hátsó kerekek, valamint azok futófelület-mélysége 5. A vezérlő és a töltő csatlakozói
„C” terület	A biztonság érdekében félévente átfogó karbantartásra van szükség.

8. Egyéb

Szállítási és tárolási feltételek

Szállítás és tárolás során az elektromos kerekesszéket a címkén feltüntetett módon kell elhelyezni.

- Szállításkor kerülje a nedvességet, a napfényt és a hőforrást.
- Ha az elektromos alkatrészek nedvesség miatt megsérülnek, kérjük, ne tárolja a kerekesszéket esőben, kültéren és nedvességben.
- Tárolási feltételek:
 - ▶ Környezeti hőmérséklet $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$;
 - ▶ Relatív páratartalom $\leq 80\%$;
 - ▶ Légnyomás $86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$.

ESEMÉNYJELENTÉS:

A készülék használatával kapcsolatban felmerülő minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

9. Kapcsolat

Cég név	Mobiak SA
Cím	KATHIANA AKROTIRIOU
	Telefon: +30 2821 63222
	Email: medicaexports@mobiak.com
Web:	www.mobiakcare.com

 MOBIAK S.A.
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



A címkén, a fő kartondobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvön nyomtatott szimbólumok leírása

	Orvosi eszköz		CE jelölés
	Gyártó		Gyártási dátum
	Termék szám		Olvassa el a használati utasítást
	Sorozat szám		Ne használja ha a csomagolás sérült
	Tételszám		Rögtön felfelé
	Egyedi eszközazonosító		Napfénytől távol tartandó
	Tartsa szárazon		Halmozási magasság
	Óvatosan kezelje		Törékeny
	Csak beltéri használatra		Az elektromos és elektronikus berendezések hullékáról szóló irányelv

10. Garancia

A termékre a vásárlás dátumától számított két* (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlzott használatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkra. NEM terjed ki továbbá a használat során vagy idővel elkopó alkatrészekre, mint például a fékek, kerekek és műanyag alkatrészek.

A természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), szállítók által okozott károkra vagy hibákra a garancia nem vonatkozik.

*HAT (6) hónap az akkumulátorra

A garancia nem terjed ki a szervizelésre vagy a pótalkatrészekre, kivéve, ha azokat egy hivatalos szervizrészleg vagy a termék gyártója megvizsgálta. A garanciális áruk szállítási költségeit a felhasználó-vásárló vagy a kereskedő fizeti.

 **MOBIAC S.A**
KAGIANA AKROTIRIOY, XANIA - KPTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

 **MOBIAC®**
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING since 1977



Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft 2000 Szentendre, Kőzúzó út 1. 26-309223